


使用說明書

可折疊站立扶手

型號 PN-L80401

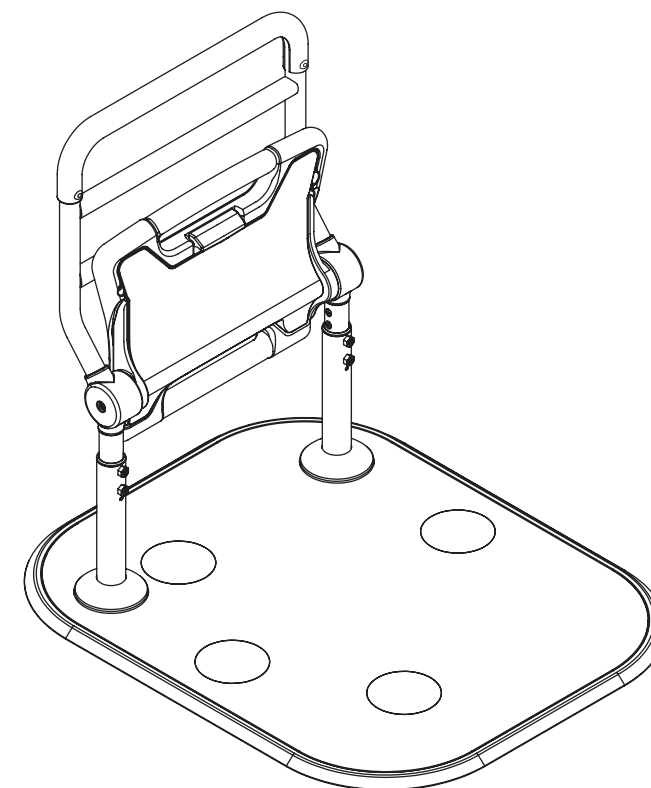

目錄

●安全注意事項		2~4
●各部分名稱		5
●零件、配件一覽表		5
●商品尺寸圖		5
●組裝確認		5
●使用前的確認		6
●使用方法		7
●清潔保養		8
●安心檢查表		9
●疑似故障時		9
●規格		10

最大使用者體重：100kg

販售者：台灣松下銷售股份有限公司
新北市中和區建六路57號
電話：0800-098800/02-412-8222

製造者：Panasonic AGE FREE Co., Ltd
總公司 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048號
© Panasonic AGE-FREE Co., Ltd. 2026

使用前請務必閱讀。

誠摯感謝您購買可折疊站立扶手。

- 請詳閱使用說明書，正確安全地使用本產品。
- 使用前請務必閱讀「安全注意事項」（第2~4頁）。
- 請確認已填寫保固書上的「購買日、銷售商名稱」等資訊，並與使用說明書一同妥善保存。

安全注意事項

請務必遵守下列說明事項，以免造成人身傷害或財物損失。

■對於因誤用而可能產生的危害或損害程度，已加以分類並進行說明。

 警告	表示為「有可能導致死亡或重傷等的內容」。	 注意	表示為「有可能導致受傷或造成財物損害的內容」。
---	----------------------	---	-------------------------

■務必遵守內容的種類以下面的圖示分別說明（下記為圖形表示範例）。

 本圖示表示禁止之意。	 本圖示表示務必遵照指示執行之意。
--	--

 警告	
 禁止	■請勿在柔軟地面、凹凸不平、有高低差或傾斜的地面使用 否則可能造成扶手不穩定，導致傾倒而受傷。
 禁止	■請勿在火源、暖爐或暖風機附近使用 會導致火災或燙傷，非常危險。 此外，會因高溫造成變質或破損，並導致事故。
 禁止	■請勿在戶外或浴室內等接觸到水的場所使用。 會因腐蝕造成破損或變形，並導致事故。
 禁止	■請勿往水平方向施力 由於並非固定式，可能導致傾倒而受傷。
 禁止	■請勿將頭部、身體、手或腳伸入扶手框架或結構物之間。 否則可能會導致窒息或骨折。
 禁止	■非維修業者請勿進行拆解、改造或維修 否則將造成性能下降，並導致事故。
 禁止	■請勿用於扶手以外的用途 否則可能導致破損，或導致傾倒而受傷。
 禁止	■請勿於溼手或溼腳時使用 因水打滑，可能導致傾倒而受傷。
 禁止	■本產品僅限單獨使用。絕對不可與其他產品組合或連接使用 否則將導致破損或受傷。此外，無法保證與其他產品組合後製作物的安全性。
 禁止	■與安裝於電動床上的側護欄或輔助桿組合使用時，請勿將頸部、手或腳伸入縫隙。 若存在可能夾住頸部、手或腳的縫隙，將導致事故。
 禁止	■使用扶手時請勿觸碰操作桿。 平面部的鎖定可能會解除，導致失去平衡而傾倒，並造成受傷。
 禁止	■體重超過100kg者請勿使用 否則可能造成扶手不穩定，導致傾倒而受傷。
 禁止	■請勿拉扯扶手部或以身體撞擊扶手部 可能因破損造成扶手不穩定，導致傾倒而受傷。
 禁止	■請勿套上商品包裝用的塑膠袋或薄膜 可能導致窒息。
 禁止	■請勿兩人以上同時使用 本產品僅限1人使用。


 警告	
 務必遵守	■請定期確認是否有零件破損、螺絲鬆動、晃動或異常。 否則可能造成扶手不穩定，導致傾倒而受傷。
 務必遵守	■請注意底座與設置面的高低差。 可能因高低差導致傾倒而受傷。
 務必遵守	■請確認使用者（是否能安全使用）的狀況，若需要協助時，請由照顧者陪同並充分注意安全 →不再適合使用時，請立即停止使用，並諮詢醫師、看護人員或個案管理師等專業人員，接受適當處理。
 務必遵守	■設置後，請務必確認有無晃動、螺絲鬆動或忘記鎖緊 否則可能造成扶手不穩定，並導致傾倒而受傷。
 務必遵守	■於電動床使用時，請先確認電動床的使用說明書 某些特殊病床等可能無法使用本產品。
 務必遵守	■設置於電動床使用時，若在頭部或手腳伸入扶手的狀態下操作床，可能導致夾住而受傷。 於電動床使用時，請設置於不會夾住使用者的安全位置使用。
 務必遵守	■請務必於底座承受體重的狀態下使用 由於並非固定式，可能導致傾倒而受傷。
 務必遵守	■於棉被等使用時，請務必確認棉被與扶手之間距離32cm以上 否則可能會導致窒息或骨折。
 務必遵守	■產品為非固定式，設置後請確認使用者的狀況後再使用 否則將導致傾倒等事故。
 務必遵守	■若發現產品有異常，請停止使用 若未正確設置或處於會影響功能的狀態時，請立即停止使用，並聯繫原購買產品的經銷商。
 務必遵守	■在黑暗等無法辨識扶手位置的狀態下使用時請充分注意 否則將導致傾倒或受傷。
 務必遵守	■請確認平面部已鎖定後，再使用收納或展開。 否則將導致傾倒或受傷。
 務必遵守	■使用前請確認扶手的覆蓋有無裂痕等劣化情況 否則可能造成扶手不穩定，並導致傾倒而受傷。
 務必遵守	■使用時，請依使用者的身體狀況及設置環境進行適配評估，確認扶手高度與動線。 否則無法發揮原有的性能。請依使用者的動線進行最佳的設定與設置。
 務必遵守	■設置於床邊時，確保扶手與床之間沒有縫隙。將平面部展開設置時，將床與扶手的高度調整成一致。 若存在可能夾住頸部、手或腳的縫隙，將導致事故。

 注意	
 禁止	■請勿使用棕刷、去汙粉、含研磨劑的海綿等或是含氯清潔劑、鹼性清潔劑、稀釋劑、甲酚等 否則可能導致劣化或變形等性能顯著下降。
 禁止	■請勿將本產品的地毯取下用於本產品以外的用途 否則將導致破損或受傷。
 務必遵守	■底座及扶手框架請務必以指定螺絲固定於指定位置 否則可能造成扶手變形、破損或性能下降，並導致事故。
 禁止	■地毯請勿放置重物或尖銳物品 否則可能留下痕跡或導致破裂。


⚠ 注意

❗ 務必遵守	■請於地毯貼附的狀態下使用 在地毯掀起或未安裝的狀態下使用， 可能導致傾倒。	❗ 務必遵守	■搬運時請注意避免商品掉落 請確認各部的螺絲沒有鬆動。 否則可能導致扶手變形、破損或受傷。
❗ 務必遵守	■螺絲請對準螺絲孔筆直鎖緊 若強行鎖緊，可能導致螺紋損壞。	❗ 務必遵守	■請使用中性清潔劑。 請勿使用鹼性清潔劑、酸性清潔劑或 含氯清潔劑等 否則可能導致劣化或破損，並導致受傷。
❗ 務必遵守	■組裝請由交貨業者進行 若未正確組裝或調整高度，將造成扶手不穩定而 導致傾倒。	❗ 務必遵守	■地毯請勿使用滾筒式洗脫烘洗衣機或 烘乾機 否則可能導致縮水或劣化。
❗ 務必遵守	■若出現結露，請以乾布等擦拭。 本產品的金屬部分在某些室內環境下可能會產生結 露。若將結露狀態放置不理，將導致棉被或榻榻米 產生黴菌。請隨時擦拭後再使用。	❗ 務必遵守	■地毯請依洗滌標示進行清洗 否則可能導致縮水或劣化。
❗ 務必遵守	■若因手部油脂或護手霜等使手變得容易 打滑，請擦拭後再使用 將導致傾倒。	❗ 務必遵守	■地毯請勿使用柔軟精 可能導致劣化或性能下降。
❗ 務必遵守	■設置底座時請充分注意避免夾到手指或腳 將導致受傷。	❗ 務必遵守	■地毯請勿使用熨斗 可能導致劣化或性能下降。
❗ 務必遵守	■產品請存放在不受陽光直曬、常溫常溼的 室內 若存放在高溫潮溼的場所，可能導致變形或接合部 脫落。	❗ 務必遵守	■地毯請勿使用含氯漂白劑進行漂白 否則可能導致褪色或性能下降。
❗ 務必遵守	■若附著尿液或含鹽分的液體，請依清潔保 養方法進行擦拭 清潔保養錯誤，可能導致變質或破損，性能下降， 並造成事故。	❗ 務必遵守	■地毯請勿與其他衣物一起清洗 否則可能導致性能下降。
❗ 務必遵守	■高度調整時，請一邊抬起扶手部一邊操作 否則可能導致扶手部掉落而受傷。	❗ 務必遵守	■地毯清洗後請在陰涼處晾乾， 待充分乾燥後再使用 否則可能導致性能無法發揮。
❗ 務必遵守	■請在每根支柱插入2支高度調整螺絲的 位置使用。 否則可能導致性能無法發揮。	❗ 務必遵守	■請勿在地毯背面使用布料除臭噴霧等 否則可能導致性能下降。
❗ 務必遵守	■請在操作桿確實拉到底的狀態下， 進行平面部的收納或展開操作。 操作時未完全拉到底，可能導致破損。	❗ 務必遵守	


■各部分名稱■

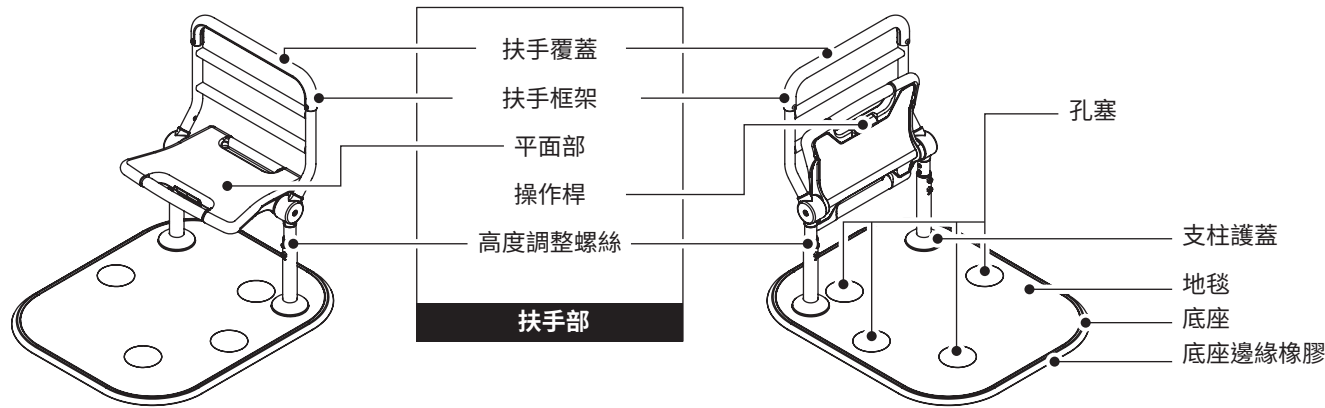

■零件、配件一覽表■

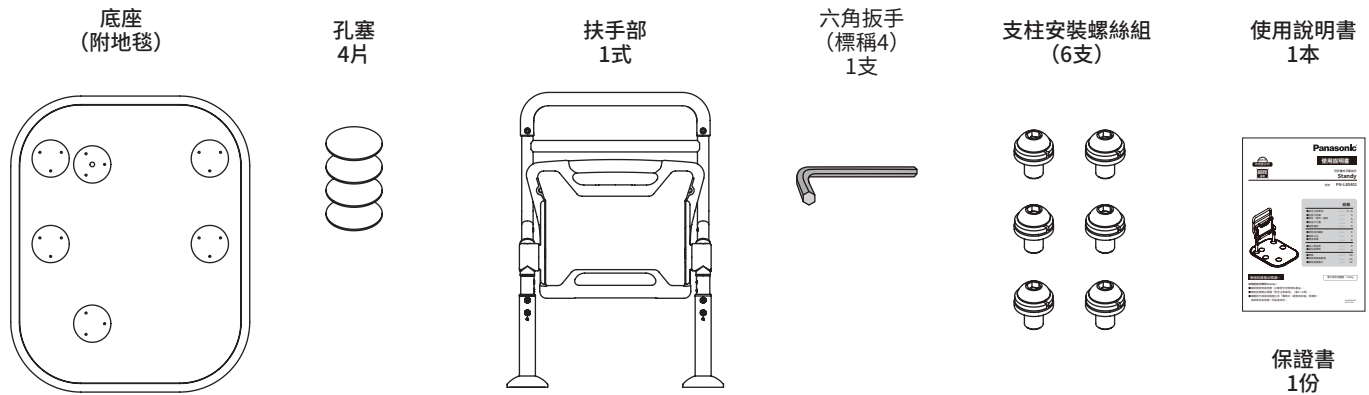

■商品尺寸圖■

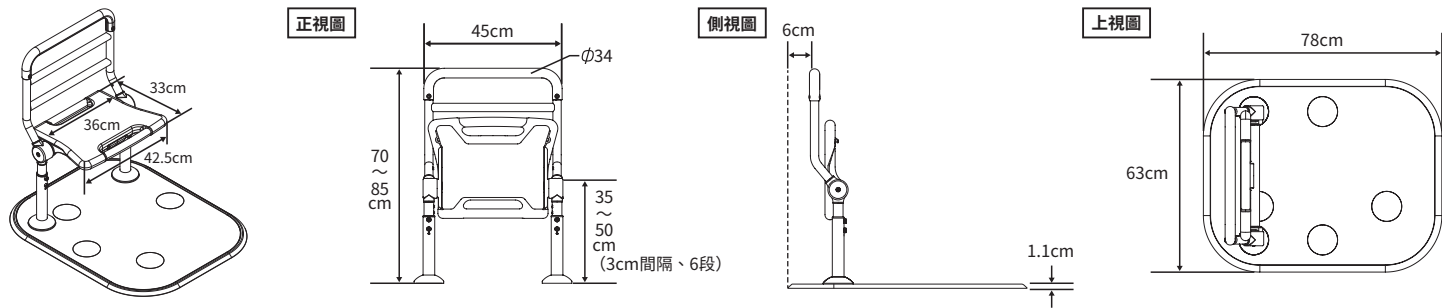

■組裝確認■


請依下表進行組裝確認。

項目	檢查
地面是否有高低差？	
高度調整螺絲是否鬆動？	
底座與支柱的安裝螺絲是否鬆動？	
螺絲頭是否有毛邊？	

■ 使用前的確認（組裝與調整） ■

1. 選擇支柱安裝位置


決定支柱的安裝位置，未使用的安裝位置請以孔塞封住。

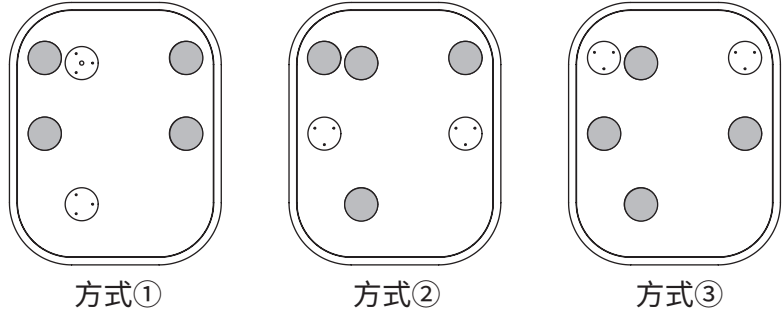

2. 將支柱安裝至底座


請使用隨附的六角扳手（標稱4）。

在抬起支柱護蓋的狀態下，將兩根支柱分別以各3支、共6支的支柱安裝螺絲安裝至底座上。
（鎖緊扭力4N m以上）

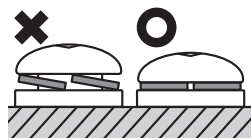

請使用隨附工具確實鎖上螺絲，並確認已確實鎖緊。

※若螺絲難以鎖入，請先鬆開3支高度調整螺絲後再安裝。
※安裝時請先將6支螺絲暫時固定於各安裝位置後再鎖緊。

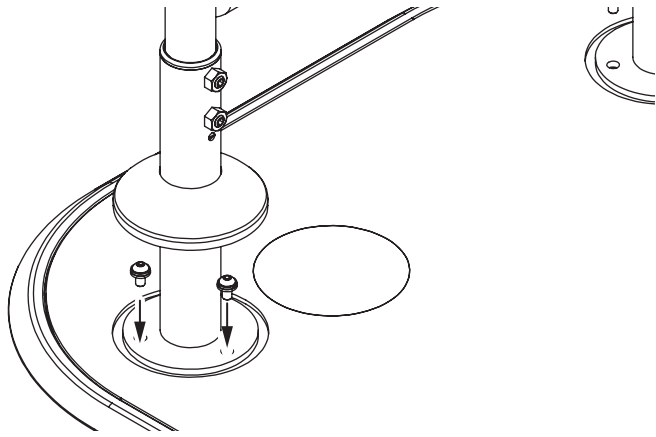


3. 高度調整

請使用隨附的六角扳手（標稱4）。

扶手高度為距離底座70cm~85cm，可每3cm調整（6段）。

- 請取下4支高度調整螺絲（左右各2支），將扶手部滑動至要固定的高度。
- 請將高度調整螺絲插入孔中鎖緊。（鎖緊扭力5N m以上）

※請在支柱固定於底座的狀態下調整高度。

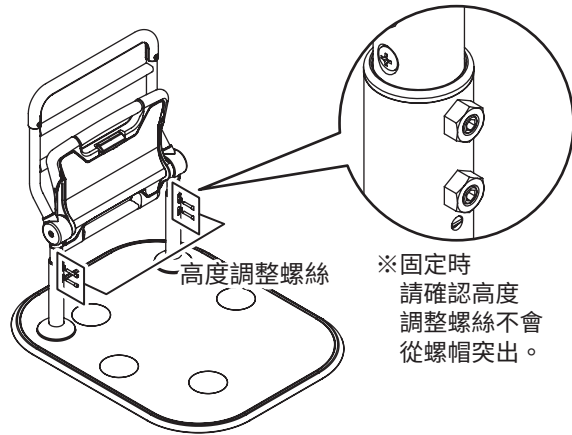

⚠ 警告


- ❌ 禁止 ■ 請勿在柔軟地面、凹凸不平、有高低差或傾斜的地面使用
否則可能造成扶手不穩定，導致傾倒而受傷。

⚠ 注意

- | | | | |
|--------|---|--------|--|
| ❗ 務必遵守 | ■ 請在每根支柱插入2支高度調整螺絲的位置使用。
否則可能導致性能無法發揮。 | ❗ 務必遵守 | ■ 螺絲請對準螺絲孔筆直鎖緊
若強行鎖緊，可能導致螺紋損壞。 |
| ❗ 務必遵守 | ■ 高度調整時，請一邊抬起扶手部一邊操作
否則可能導致扶手部掉落而受傷。 | ❗ 務必遵守 | ■ 搬運時請注意避免商品掉落
請確認各部的螺絲沒有鬆動。
否則可能導致扶手變形、破損或受傷。 |


■ 使用方法 ■

滑動操作桿即可解除平面部的鎖定。在解除鎖定的狀態下將平面部往前拉動，平面部會旋轉90°，並可變更位置。

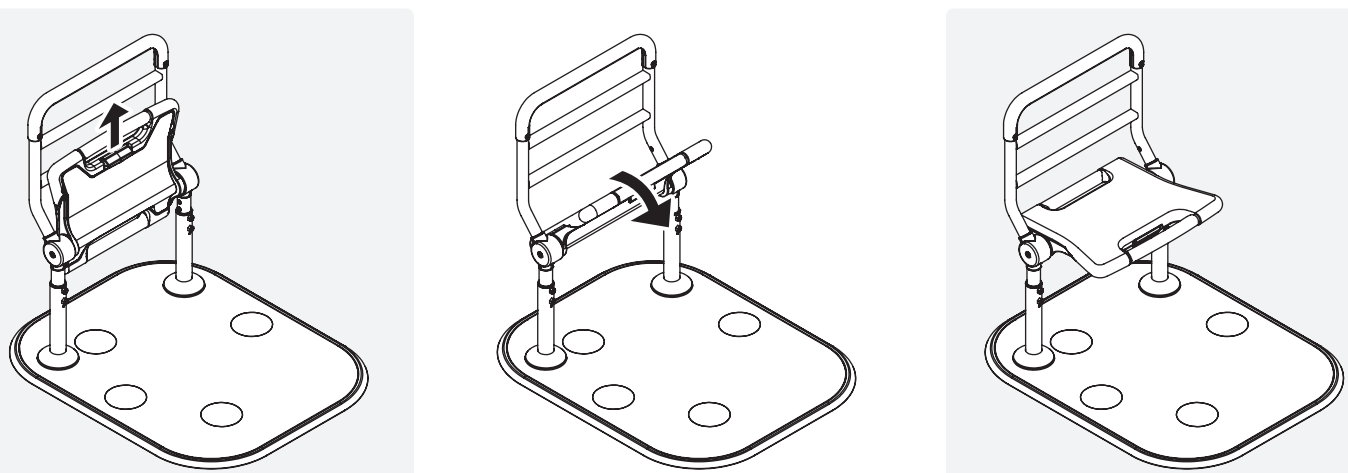


收納狀態

- 請於操作桿確實拉到底的狀態 操作平面部的收納或展開。

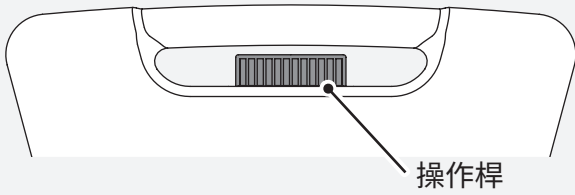

展開狀態

- 請確認已處於鎖定狀態後再收納或展開。
- 若未鎖定，操作桿會處於未完全回復的狀態。

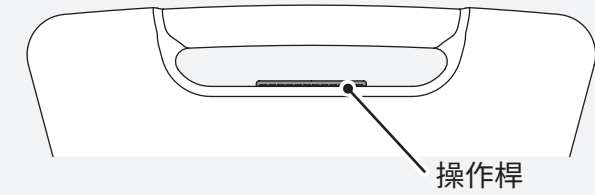

⚠ 警告

- | | | | |
|------|--|------|-----------------------------------|
| ❌ 禁止 | ■ 請勿用於扶手以外的用途
否則可能導致破損，或導致傾倒而受傷。 | ❌ 禁止 | ■ 請勿往水平方向施力
由於並非固定式，可能導致傾倒而受傷。 |
| ❌ 禁止 | ■ 請勿兩人以上同時使用
本產品僅限1人使用。 | ❌ 禁止 | ■ 請勿於溼手或溼腳時使用
因水打滑，可能導致傾倒而受傷。 |
| ❌ 禁止 | ■ 體重超過100kg者請勿使用
否則可能造成扶手不穩定，導致傾倒而受傷。 | | |

⚠ 注意


- | | | | | | |
|--------|---|--------|--|--|--|
| ❗ 務必遵守 | ■ 請確認平面部已鎖定後，再使用收納或展開。
否則將導致傾倒或受傷。 | ❗ 務必遵守 | ■ 請務必於底座承受體重的狀態下使用
由於並非固定式，可能導致傾倒而受傷。 | ❗ 務必遵守 | ■ 請定期確認是否有零件破損、螺絲鬆動、晃動或異常。
否則可能造成扶手不穩定，導致傾倒而受傷。 |
| ❗ 務必遵守 | ■ 設置於床邊時，確保扶手與床之間沒有縫隙。
將平面部展開設置時，將床與扶手的高度調整成一致。
若存在可能夾住頸部、手或腳的縫隙，將導致事故。 | | ❗ 務必遵守 | ■ 請在操作桿確實拉到底的狀態下，進行平面部的收納或展開操作。
操作時未完全拉到底，可能導致破損。 | |

■ 清潔保養 ■

- 扶手部／底座的清潔保養方法
- 使用稀釋的中性清潔劑，將海綿或柔軟的布沾汙來擦拭產品，再將清潔劑擦拭乾淨，並在陰涼處晾乾，或用乾布擦乾。

警告	
禁止	■ 非維修業者請勿進行拆解、改造或維修 否則將造成性能下降，並導致事故。
注意	
禁止	■ 請勿使用棕刷、去汙粉、含研磨劑的海綿等或是含氯清潔劑、鹼性清潔劑、稀釋劑、甲酚等 否則可能導致劣化或變形等性能顯著下降。
務必遵守	■ 請使用中性清潔劑。請勿使用鹼性清潔劑、酸性清潔劑或含氯清潔劑等 否則可能導致劣化或破損，並導致受傷。

- 地毯的清潔保養方法
- 若地毯孔塞表面附著髒汙，請使用吸塵器等清除，或將布沾上清水或中性清潔劑後擰乾擦拭。

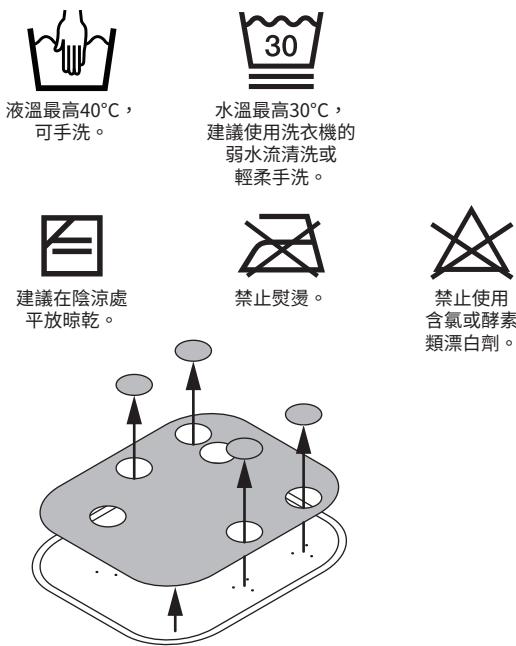

地毯與孔塞可清洗。
請依右側洗滌標示進行清洗。

- 拆下地毯
- 請先拆下支柱，再拆下地毯與孔塞。

說明	■ 若地毯長時間貼附在底座上，可能會緊密黏在底座表面。 建議定期拆下清洗。 ■ 若地毯的吸附力較強，請慢慢拆下。 若地毯背面的吸附材附著在底座上，請以沾有溫水的布擦拭。 ■ 若地毯附著灰塵等，會降低與底座的吸附力。此情況在清洗後即可恢復。若清洗後吸附力仍無法恢復，請更換地毯。
----	--

注意			
務必遵守	■ 地毯請勿使用滾筒式洗脫烘洗衣機或烘乾機 否則可能導致縮水或劣化。	務必遵守	■ 地毯請勿使用含氯漂白劑進行漂白 否則可能導致褪色或性能下降。
務必遵守	■ 地毯請依洗滌標示進行清洗 否則可能導致縮水或劣化。	務必遵守	■ 地毯請勿與其他衣物一起清洗 否則可能導致性能下降。
務必遵守	■ 地毯請勿使用柔軟精 可能導致劣化或性能下降。	務必遵守	■ 地毯清洗後請在陰涼處晾乾， 待充分乾燥後再使用 否則可能導致性能無法發揮。
務必遵守	■ 地毯請勿使用熨斗 可能導致劣化或性能下降。	務必遵守	■ 請勿在地毯背面使用布料除臭噴霧等 否則可能導致性能下降。

■ 安心檢查表 ■

可折疊式平面扶手 Standy		※檢查欄位不足時，請影印使用。									
安全檢查項目		檢查結果（符合者請標示○）									
		日期									
安心檢查	底座邊緣材料已破損										
	平面部無法折疊										
	出現變形或裂痕										
	購買後已超過8年										
	出現生鏽或變色										
若有標示○時，表示已處於危險狀態，請停止使用，並洽詢原購買產品的經銷商。											

若出現上述檢查項目以外的異常時，請向經銷商等專業人員諮詢。

- 關於產品的長期使用
1. 主體上的顯示內容
- 在主體上標示製造年月日，用於提醒可能會由於隨時間的劣化，導致提高發生危害的風險。（記載於底座背面）
2. 所謂預估安全使用期間
- 對於一般家庭使用的Standy，在標準條件下以適當的方式使用，並進行適當的維護保養時，可安全無障礙使用的預估期間。並非免費保固期。
※若設置於一般家庭以外的場所（如醫院、各類設施等由不特定多數人使用之場所），視使用條件而定，可能會比預估安全期間更早發生劣化。
3. 所謂隨時間劣化
- 係指因長期使用或處理而發生的劣化。

【預估安全使用期間】8年（於一般家庭使用時）
若超過預估安全使用期間仍繼續使用，可能會由於隨著時間的劣化，導致受傷等事故。

■ 疑似故障時 ■

在委託維修前，請先閱讀以下內容。

狀況	確認	處理
使用過程中會晃動	●地面是否有高低差？	●請確認所設置的地面狀況。
	●高度調整螺絲是否鬆動？	●請鎖緊高度調整螺絲。
	●支柱安裝螺絲是否鬆動？	●請鎖緊支柱安裝螺絲。

廢棄時的注意事項

廢棄時請盡可能依材料類別進行拆解並依照當地的垃圾分類規定廢棄。

■規格■

產 品 名 稱	可折疊式平面扶手 Standy	
產 品 型 號	PN-L80401	
產 品 重 量	22.5kg	
尺 寸	產 品 尺 寸	寬63 × 深78cm（底座尺寸）
	扶 手 高 度	70 ～ 85cm（3cm間隔、6段）
	平 面 部 高 度	35 ～ 50cm（3cm間隔、6段）
材 質	底 座 ／ 支 柱 ：鋼 底座邊緣橡膠 ：合成橡膠 平 面 部 ：聚乙烯 扶 手 覆 蓋 部 ：彈性體 地 毯 ：合成纖維	
最大使用者體重	100kg	