


使用說明書

座式馬桶專用 伸縮扶手(不鏽鋼)

型號 PN-L53001

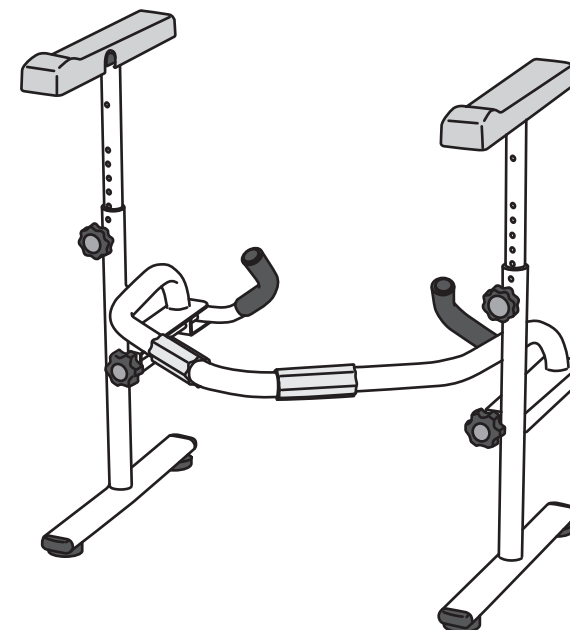

目錄

●安全注意事項		2
●各部分名稱		4
●零件、配件一覽表		4
●商品尺寸圖		4
●使用前的確認		5
●使用方法		5
●清潔保養		7
●規格		8

最大使用者體重：100kg以下

使用前請務必閱讀。

誠摯感謝您購買馬桶專用伸縮扶手。

●請詳閱使用說明書，正確安全地使用本產品。

●使用前請務必閱讀「安全注意事項」（第2、3頁）。

●請確認已填寫保固書上的「購買日、・銷售商名稱」等資訊，並與使用說明書一同妥善保存。

■ 安全注意事項 ■

請務必遵守。

請務必遵守下列說明事項，以免造成人身傷害或財物損失。

■對於因誤用而可能產生的危害或損害程度，已加以分類並進行說明。



警告 表示為「有可能導致死亡或重傷等的內容」。



注意 表示為「有可能導致輕微受傷或造成財物損害的內容」。

■務必遵守內容的種類以下面的圖示分別說明。 （下記為圖形表示範例）

 本圖示表示禁止之意。	 本圖示表示務必遵照指示執行之意。
---	---

警告  禁止 ■ 請勿站在扶手上、懸掛於扶手上或倚靠扶手。 否則可能導致扶手破損而受傷。 	 禁止 ■ 請避免讓身體任何部位夾入縫隙或開口處。 依使用者的身心狀況或使用情況，若被夾在縫隙中，可能導致危及生命的重大事故。請特別注意避免頭部、頸部、手臂或腳部被夾住。
 禁止 ■ 坐下或使用後起身時，請勿將過多的重量靠壓在單側扶手上。 將導致傾倒或受傷。	 禁止 ■ 請勿刻意搖晃。 將導致傾倒或受傷。
 禁止 ■ 調節器請勿伸出5mm以上。 否則可能造成安裝不穩定，導致受傷。	 禁止 ■ 當產品出現破損或不正常狀態時，請勿使用。 若在產品或安裝狀態不正常的情況下使用，可能導致受傷。
 禁止 ■ 體重超過100kg者請勿使用。 否則可能導致本體破損而受傷。	 禁止 ■ 請勿用於西式馬桶使用的扶手以外之用途。 若將本產品當作兒童的玩具或作為其他用途的扶手使用，可能導致破損或受傷。
 禁止 ■ 請勿將扶手往馬桶前方拉動。 否則產品將從馬桶脫落，導致傾倒或受傷。	 禁止 ■ 請勿套上商品包裝用的塑膠袋或薄膜。 可能導致窒息。
 禁止 ■ 請勿安裝於可安裝的馬桶型式以外。 否則可能造成安裝不穩定，導致受傷。	 禁止 ■ 若地面有腐蝕或晃動的情況，請勿安裝。 若地面本身強度不足，在承受整體重量時，主體可能脫落而導致受傷。
 務必遵守 ■ 請確實鎖緊扶手調整旋鈕。 否則可能造成安裝不穩定，導致受傷。	 務必遵守 ■ 請將扶手護套前端抵靠馬桶後固定。 否則可能造成安裝不穩定，導致受傷。
 務必遵守 ■ 請務必固定於馬桶後再使用。 否則可能造成安裝不穩定，導致受傷。	 務必遵守 ■ 請定期檢查各部位有無異常，例如螺絲是否鬆動等。 主體無法正常運作否則可能導致破損或受傷。

販售者：台灣松下銷售股份有限公司
新北市中和區建六路57號
電話：0800-098800/02-412-8222

製造者：Panasonic AGE FREE Co., Ltd
總公司 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048號
© Panasonic AGE-FREE Co., Ltd. 2026

警告

！

務必遵守

■ 若使用中出現鬆動或晃動的情形，請立即停止使用，並洽詢原購買產品的經銷商。
否則可能造成安裝不穩定，導致受傷。

！

務必遵守

■ 使用前請將產品前後左右搖動，確認是否有晃動或位移。
否則可能造成安裝不穩定，導致受傷。

！

務必遵守

■ 於使用者坐下或使用後起身時，若無法自行充分確保身體安全，請由照顧者陪同協助。
可能導致傾倒或受傷。

！

務必遵守

■ 將主體安裝於地面時，為確保安裝強度，請安裝於厚度12mm以上的結構用合板（JAS規格品）或同等以上的底材上。
若地面本身強度不足，在承受整體重量時，主體可能脫落而導致受傷。

！

務必遵守

■ 調整扶手高度時，請注意避免夾到手指。
可能導致受傷。

！

禁止拆解


■ 切勿自行拆解、維修或改造。請勿使用非原廠替代零件。
否則可能導致主體無法正常運作，導致破損或受傷。
修理請洽詢原購買產品的經銷商。

注意

！

禁止

■ 請勿將產品置於陽光直射的場所，或靠近火源。
否則將導致褪色或龜裂

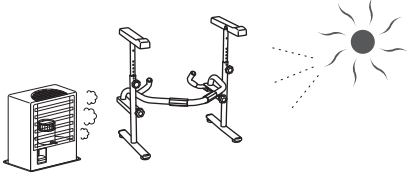

！

禁止

■ 請勿使用棕刷、去汙粉、含研磨劑的海綿等或是氯系清潔劑、酸性／鹼性清潔劑、稀釋劑、甲酚等。
否則可能因塑膠部位劣化或破損而導致受傷。

！

務必遵守

■ 請確認馬桶已確實固定。
否則將造成安裝不穩定，導致受傷。

！

禁止

■ 請勿使用工具鎖緊旋鈕螺栓。
否則將導致破損。

！

禁止

■ 請勿設置於馬桶地墊上。
否則可能導致主體無法正常運作，導致破損或受傷。

！

禁止

■ 請勿安裝於樹脂製馬桶上。
否則可能導致馬桶破損而受傷。

！


務必遵守

■ 使用稀釋的中性清潔劑，將海綿或柔軟的布沾溼來清洗產品，清洗後以清水沖洗至無清潔劑殘留，再用乾布擦乾水分。
若附著清潔劑，會容易打滑，可能導致傾倒而受傷。

安全使用須知

- 使用前請將產品前後左右搖動，確認是否有晃動或位移。
若有晃動的情形，請確認下列項目。
- 可能是馬桶固定旋鈕已鬆動。
 - 請重新鎖緊馬桶固定旋鈕。
 - 可能是扶手調整旋鈕已鬆動。
 - 請重新鎖緊扶手調整旋鈕。
 - 可能是調節器未調整或已脫落。
 - 請調整或安裝調節器。
 - 可能是扶手護套前端未碰觸到馬桶。
 - 請在扶手護套前端確實抵靠馬桶的狀態下鎖緊馬桶固定旋鈕。
 - 若已固定於地面，可能是木螺絲鬆動。
 - 請勿自行維修，務必洽詢原購買產品的經銷商。


各部分名稱

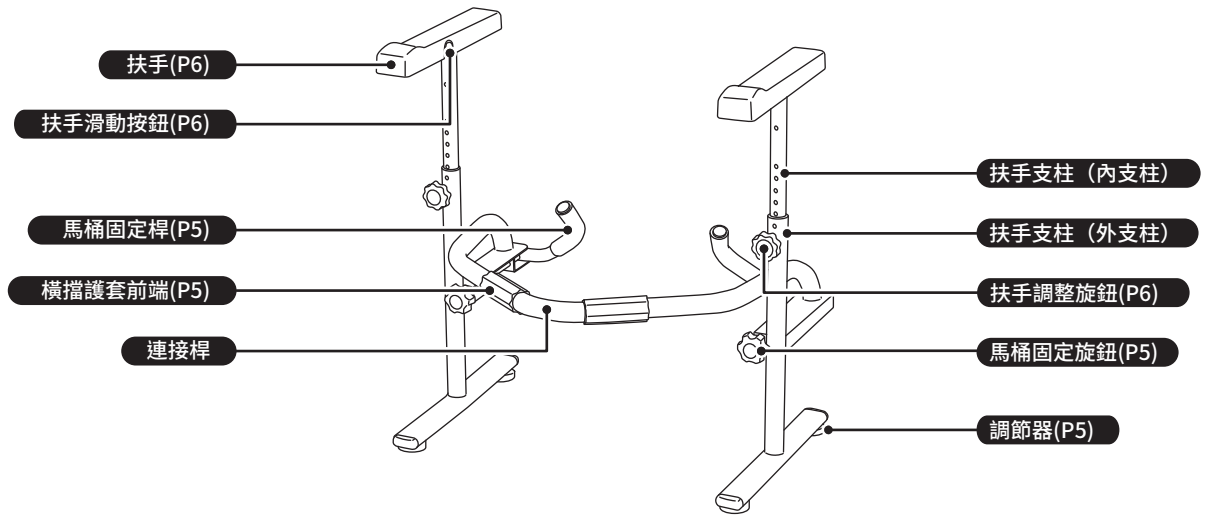

零件、配件一覽表

本產品為組裝完成品。請務必確認隨產品一同出貨的零件與配件。

主體
1架

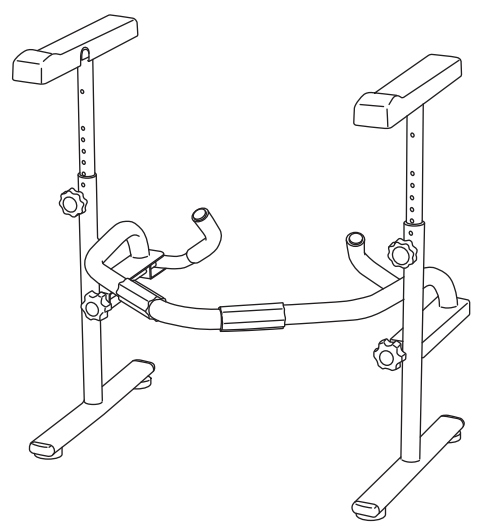


使用說明書
1本




商品尺寸圖


正視圖

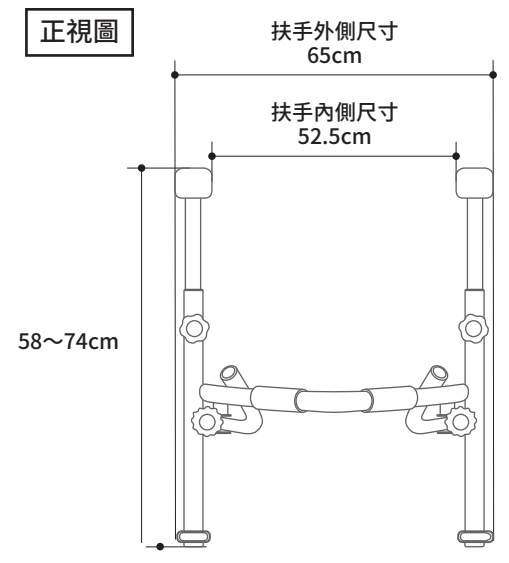

側視圖

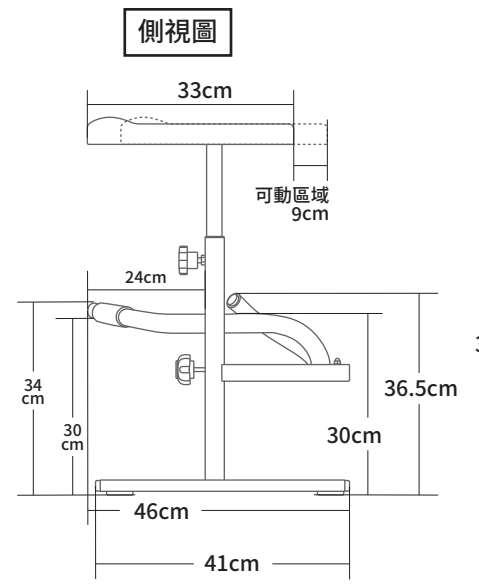

上視圖

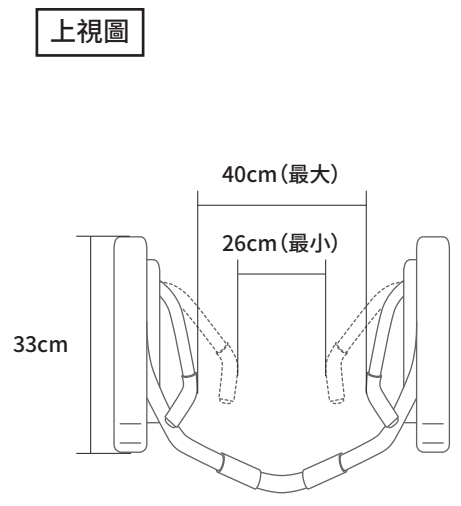

■規格■

產 品 名 稱	西式馬桶用滑動扶手（不鏽鋼）	
產 品 型 號	PN-L53001	
產 品 重 量	8.5kg	
尺 寸	產 品 尺 寸	寬65×深45×高58～74cm
	扶 手 高 度	58～74cm
	扶手內側尺寸	52.5cm
材 質	主體：不鏽鋼 扶手：聚丙稀 扶手支柱、連結桿、馬桶固定桿：不鏽鋼 馬桶固定旋鈕：ABS／不鏽鋼 扶手調整旋鈕：ABS／不鏽鋼 調節器：合成橡膠／不鏽鋼 橫擋護套：合成橡膠	
最大使用者體重	100kg以下	

另售商品

- 當各零件出現髒汙或破損時，請洽詢原購買產品的經銷商購買。更換相關事宜，請洽詢經銷商。

零件名稱	零件型號	建議零售價（未含稅）
地面固定用零件	PN-L5300032P	3,500日圓

2014年4月資訊

廢棄時的注意事項


廢棄時請盡可能依材料類別進行拆解並依照當地的垃圾分類規定廢棄。

■使用前的確認■

- 請僅安裝於家用西式馬桶使用。
- 使用前請先確認為可安裝的馬桶型式後再進行安裝。

可安裝的馬桶型式

①的尺寸為26cm～40cm時的馬桶
(①為距離地面約30cm高度處的馬桶最大寬度)

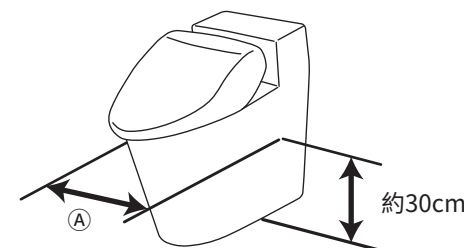

注意

■ 請勿安裝於樹脂製馬桶上。
否則可能導致馬桶破損而受傷。


■使用方法■

- 使用前請參閱P5 **■使用前的確認■**，確認是否為可安裝的馬桶型式後再進行安裝。

1 安裝至馬桶的方法

1 開啟馬桶固定桿

請配合安裝的馬桶型式旋轉馬桶固定旋鈕，並開啟馬桶固定桿。

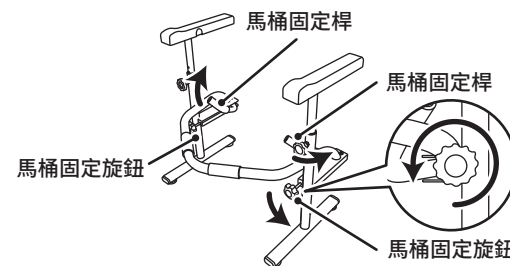


2 安裝於馬桶

請安裝於扶手護套前端與馬桶前端接觸的位置。




3 晃動調整

若因地面狀態導致晃動，請調整調節器，確認已確實設置在地面上。

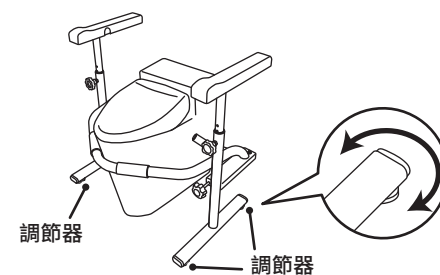

4 固定於馬桶

請將馬桶固定旋鈕鎖緊，直到主體確實固定為止。
鎖緊後，請搖動兩側的扶手，確認不會晃動。

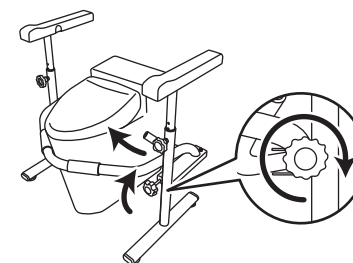

說明

■ 安裝的參考方式為：請將馬桶固定桿接觸馬桶，再將馬桶固定旋鈕旋轉1圈半。



警告

■ 調節器請勿伸出5mm以上。

否則可能造成安裝不穩定，導致受傷。

■ 請避免讓身體任何部位夾入縫隙或開口處。

依使用者的身心狀況或使用情況，若被夾在縫隙中，可能導致危及生命的重大事故。請特別注意避免頭部、頸部、手臂或腳部被夾住。




注意

■ 請勿使用工具鎖緊馬桶固定旋鈕。

否則可能導致主體破損。

2 扶手高度調整方法

- 扶手高度為自地面起算58cm~74cm，可分9段進行調整。
- ① 請將扶手調整旋鈕取下，將扶手滑動至欲固定的高度。
※ 內支柱的高度調整孔底部與外支柱前端對齊的位置，即為固定的參考位置。
- ② 請將扶手調整旋鈕插入孔內並鎖緊。

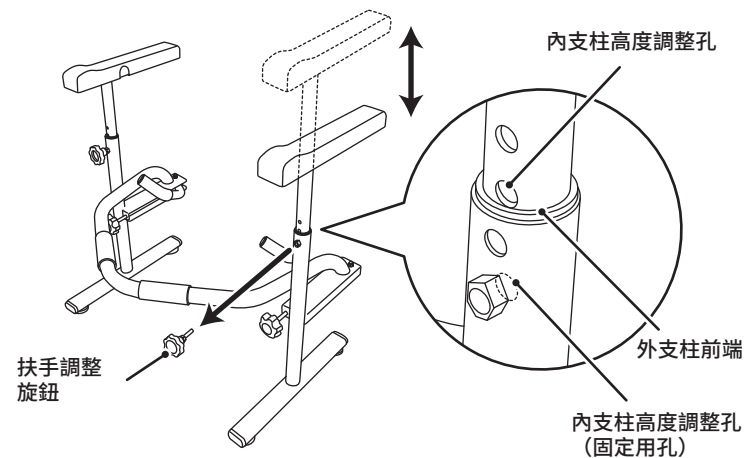


注意

■ 調整扶手高度時，請務必握住扶手。

若握住扶手（內支柱）調整高度，可能導致手指等被夾在縫隙中而受傷。


■ 使用前請確認扶手調整旋鈕已確實鎖緊，扶手不會晃動。

將造成主體不穩定，導致傾倒或受傷。

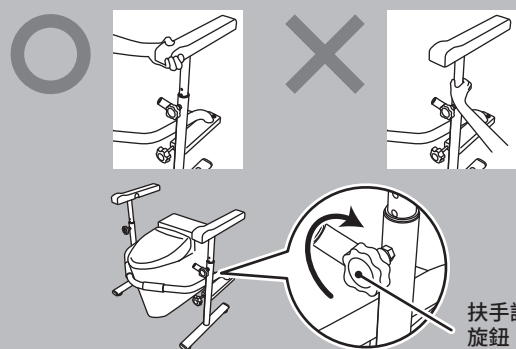

3 扶手的前後調整方法

- 扶手可每間隔3cm前後調整，共4段。
- 請按下扶手內側的扶手滑動按鈕，將扶手滑動至方便使用的位置。放開按鈕後，扶手即固定。

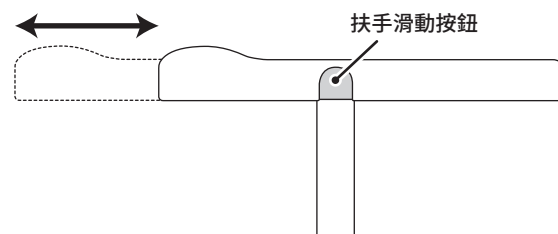

4 固定於地面的方法

■ 若不清楚地面的施工狀況，請向施工業者確認。

固定於地面所需的零件

專用地面固定零件※為另售配件。

- 地面安裝板.....2片
- 膨脹塞.....4個
- 木螺絲（6.2×32mm）.....4支


工具

- 共通使用的工具
 - 電鑽
- 地面為混凝土或磁磚時使用的工具
 - 鑽頭（混凝土用 φ8mm）
- 地面為木質時使用的工具
 - 鑽頭（木工用 φ3mm）

木質地面時

1 固定地面安裝板


請將地面安裝板夾在主體後方的調節器與框架之間。

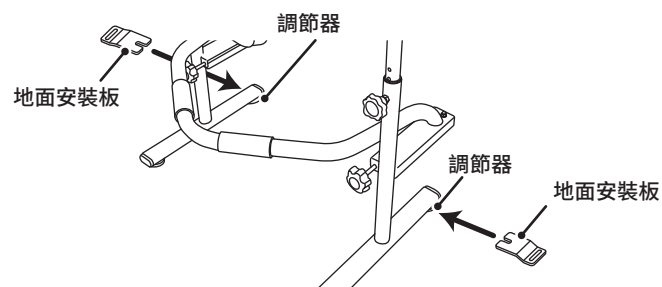

2 決定設置地點

請配合地面安裝板孔的兩端，在地面上做標記。


※左側請以相同方式進行。

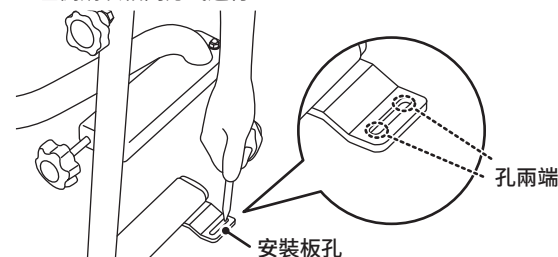

3 鑽預鑽孔

請在標記的位置，使用木工用鑽頭鑽出φ3mm的預鑽孔。

※左側請以相同方式進行。

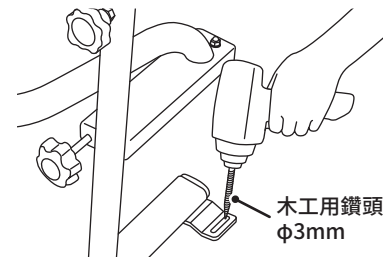

地面為混凝土或磁磚時

1 固定地面安裝板

請將地面安裝板夾在調節器與框架之間。


3 鑽預鑽孔

請在標記的位置，使用混凝土用鑽頭鑽出φ8mm的預鑽孔。

4 安裝膨脹塞

請將膨脹塞壓入預鑽孔內。


※左側請以相同方式進行。

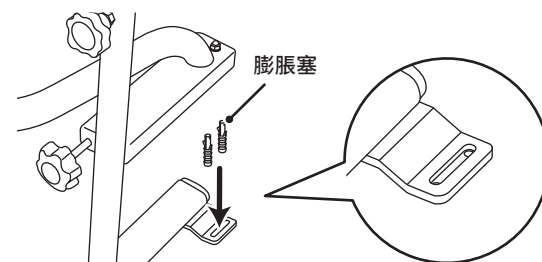

4 固定主體

請使用隨附的木螺絲確實固定。

※左側請以相同方式進行。

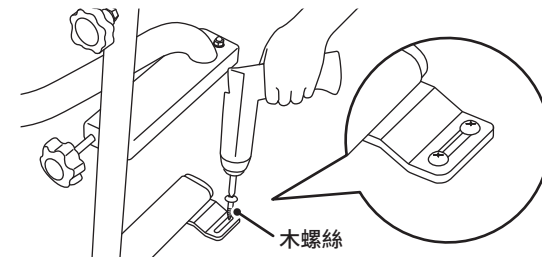


2 決定設置地點

請配合地面安裝板孔的兩端，在地面上做標記。

5 固定主體

請使用隨附的木螺絲確實固定。

※左側請以相同方式進行。

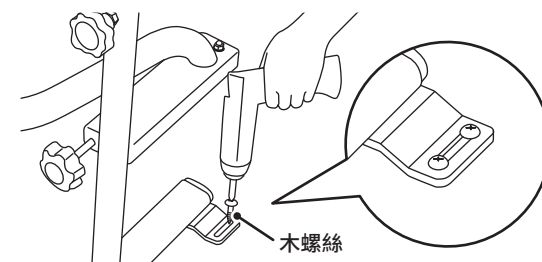

警告

■ 若地面有腐蝕或晃動的情況，請勿安裝。

若地面本身強度不足，在承受整體重量時，主體可能脫落而導致受傷。

■ 將主體安裝於地面時，為確保安裝強度，請安裝於厚度12mm以上的結構用合板（JAS規格品）或同等以上的底材上。

若地面本身強度不足，在承受整體重量時，主體可能脫落而導致受傷。

■ 請務必固定於馬桶後再使用。

否則可能造成安裝不穩定，導致受傷。

清潔保養

- 請使用稀釋的中性清潔劑，將海綿或柔軟的布沾溼進行清洗，清洗後請以清水沖洗至無清潔劑殘留，再用乾布擦乾水分。



注意

- 請勿使用棕刷、去汙粉、含研磨劑的海綿等或是氯系清潔劑、酸性/鹼性清潔劑、稀釋劑、甲酚等。
可能因塑膠部位劣化或破損而導致受傷。

