


使用說明書

浴缸椅凳[YUKURIA系列] 軟墊型

☐ 小型1220	型號	PN-L11520
☐ 小型1826	型號	PN-L11526
☐ 標準1220	型號	PN-L11620
☐ 標準1826	型號	PN-L11626

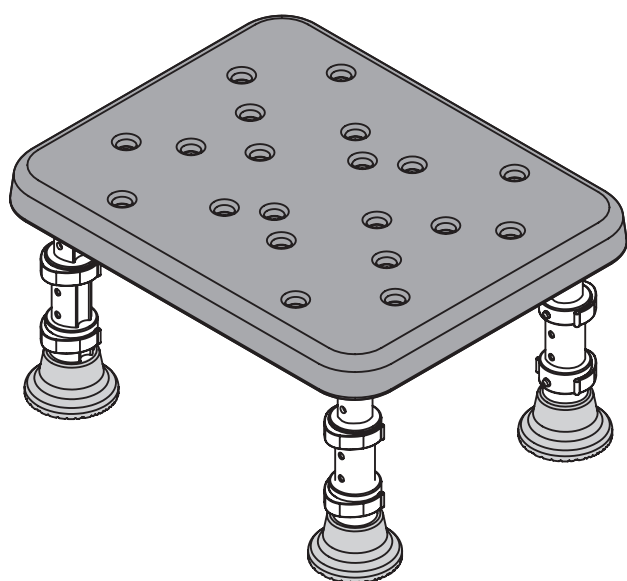

目錄

●安全注意事項		2~4
●各部分名稱		4
●商品尺寸圖		5
●使用前的確認		5
●椅面高度的調整方法		6・7
●使用方法		8
●清潔保養		9
●規格		10
●安心檢查表		11

最大使用者體重：100kg

使用前請務必閱讀。

誠摯感謝您購買浴缸椅凳[YUKURIA系列] 軟墊型。

- 請詳閱使用說明書，正確安全地使用本產品。
- 使用前請務必閱讀「安全注意事項」（第2~4頁）。
- 請確認已填寫保固書上的「購買日、銷售商名稱」等資訊，並與使用說明書一同妥善保存。

安全注意事項

請務必遵守。

請務必遵守下列說明事項，以免造成人身傷害或財物損失。

■對於因誤用而可能產生的危害或損害程度，已加以分類並進行說明。

 警告	表示為「有可能導致死亡或重傷的內容」。	 注意	表示為「有可能導致受傷或造成財物損害的內容」。
---	---------------------	---	-------------------------

■務必遵守內容的種類以下面的圖示分別說明。（下記為圖形表示範例）

 本圖示表示禁止之意。	 本圖示表示務必遵照指示執行之意。
--	--

 警告			
 禁止	■請勿跳上椅面 可能導致傾倒而受傷。	 禁止	■於人坐在椅子上的狀態下，請勿移動或拖拉主體 否則可能導致傾倒而受傷。
 禁止	■移動時請勿以攪水棒等勾住提起。 軟墊可能脫落或掉落，因而導致受傷。	 禁止	■請勿朝橫向用力施力 否則可能導致傾倒而受傷。
 禁止	■請勿在地墊或洩水板等上面使用 放置於不穩定的場所，可能導致傾倒或破損。	 禁止	■體重超過100kg者請勿使用 否則可能導致本體破損而受傷。
 禁止	■請勿刻意搖晃 否則可能導致傾倒而受傷。	 禁止	■請勿於軟墊拆下的狀態使用 可能導致主體無法正常運作，造成破損或受傷。
 禁止	■請勿用於浴室內使用的浴缸椅以外之用途 若將本產品當作兒童的玩具或置物台等使用，可能導致破損或受傷。	 禁止	■請勿跳上椅面或坐在中央以外的位置 若坐在椅面邊緣等未坐於椅面中央的位置，可能導致主體破損，或導致傾倒而受傷。
 禁止	■請勿在浴室以外使用 否則可能導致傾倒而受傷。	 禁止	■請勿同時坐兩人以上 否則可能導致傾倒而受傷。
 禁止	■請勿套上商品包裝用的塑膠袋或薄膜 可能導致窒息。	 禁止	■請勿將手指或腳趾伸入椅面的排水孔 否則手指或腳趾會無法拔出，因而導致受傷。
 禁止拆解	■切勿自行拆解、維修或改造。請勿使用非原廠替代零件。 否則可能導致主體無法正常運作，導致破損或受傷。 修理請洽詢原購買產品的經銷商。		
 務必遵守	■請放置於平坦穩定的場所使用 放置於不穩定的場所，可能導致傾倒或破損。	 務必遵守	■高度調整腳請務必固定於相同高度 若高度調整腳的固定位置不一致，可能因不穩定而導致傾倒或破損。
 務必遵守	■作為踏台使用時，請務必踩在軟墊中央 若將腳踩在軟墊邊緣，可能因不穩定而導致跌倒。		
 務必遵守	■請確實將高度調整銷安裝於高度調整腳上，安裝後請確認高度調整銷的銷有從安裝孔彈出。 若未確實安裝，高度調整腳可能在使用中脫落，導致傾倒而受傷。		

! 警告

 務必遵守	■在浴缸內使用時，請確認已確實設置4處腳橡膠後再使用。 於不穩定的狀態下使用，可能導致傾倒或破損。	 務必遵守	■若吸盤無法吸附或腳橡膠出現裂痕，請停止使用。 由於腳橡膠已劣化，可能會打滑或傾倒。請立即洽詢原購買產品的經銷商。
 務必遵守	■使用前與使用後，請將地板及淋浴椅上附著的肥皂或洗髮精沖洗乾淨 若附著肥皂或洗髮精，會變得容易打滑，可能導致傾倒而受傷。	 務必遵守	■請注意浴缸與商品之間的縫隙 於浴缸內使用時，請充分注意勿將腳伸入浴缸與主體之間的縫隙。


! 注意

 禁止	■請勿將產品放置於戶外或陽光直曬的場所 可能導致褪色、主體破損而受傷。	 禁止	■請勿使用含氯藥劑進行殺菌或消毒，或使用溫泉水或入浴劑 否則會造成腐蝕，可能導致管件破損而受傷。
 禁止	■請勿在水湧出口附近或高溫場所使用。 將導致主體破損，或導致燙傷。	 禁止	■請勿靠近火源 可能引發火災或導致變形。
 禁止	■請勿於三溫暖使用 將導致主體破損，或導致燙傷。	 禁止	■請勿澆淋熱水（60℃以上） 否則可能導致本體破損而受傷。
 禁止	■請勿使用棕刷、去汙粉、含研磨劑的海綿等或是氯系清潔劑、酸性／鹼性清潔劑、稀釋劑、甲酚等 否則可能因塑膠部位劣化或破損而導致受傷。		
 禁止	■請勿使用染髮劑。 可能造成主體劣化，並導致破損。	 禁止	■請勿於商品浸在浴缸內的狀態下使用噴射式浴缸或按摩浴缸 否則可能會因主體處於移動或不穩定的狀態，導致傾倒而受傷。
 禁止	■存放主體時，請勿掛在浴缸壁上保存。 否則可能造成主體掉落，並導致受傷。	 禁止	■主體位於浴室內時，請勿使用浴室乾燥機。 可能造成主體劣化，並導致破損。
 禁止	■請勿在木質浴缸等容易黏滑的浴缸中使用。 否則可能造成主體打滑，導致傾倒。	 禁止	■請勿只抓住軟墊提起商品 否則可能造成主體掉落，並導致受傷。



⚠ 注意

 務必遵守	■於具再加熱功能的熱水器或直接加熱式浴缸、熱水循環式浴缸（24小時浴缸）使用時，請僅在入浴時設置，使用後請從浴缸中取出 否則將造成塑膠部位變形，並導致傾倒或受傷。	
 務必遵守	■請定期檢查各部位有無異常，例如螺絲是否鬆動 可能導致主體無法正常運作，造成破損或受傷。	 務必遵守 ■設置時請勿將腳橡膠壓在排水溝蓋上。 可能導致主體晃動傾倒，並導致受傷。
 務必遵守	■請確認腳橡膠已確實安裝 腳橡膠若脫落，會容易打滑，可能導致傾倒而受傷。 此外也會使浴室地面刮傷。	 務必遵守 ■設置於排水口附近時，請注意浴缸水塞的鍊條。 可能因不穩定而導致傾倒。
 務必遵守	■從浴缸內取出商品時，請務必在浴缸內的水已排空的狀態下取出。 取出主體時可能導致跌倒而溺水。	
 務必遵守	■請使用稀釋的中性清潔劑，將海綿或柔軟的布沾溼來清洗產品，清洗後以清水沖洗至無清潔劑殘留，再用乾布擦乾水分 若附著清潔劑，會容易打滑，可能導致傾倒而受傷。	
 務必遵守	■請定期清潔設置浴缸椅的浴缸或沖洗區。 腳橡膠的位置可能會積蓄髒汙而變得容易打滑，或污垢難以清除。	

■ 各部分名稱 ■

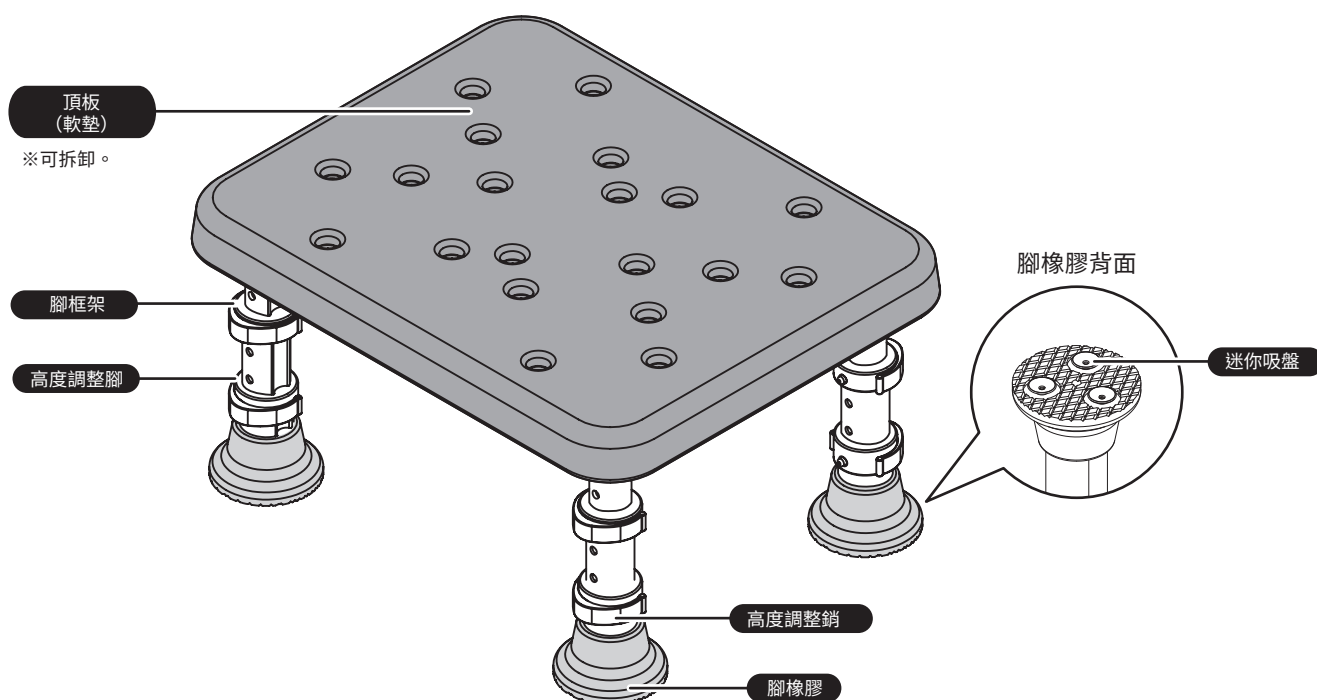


商品尺寸圖

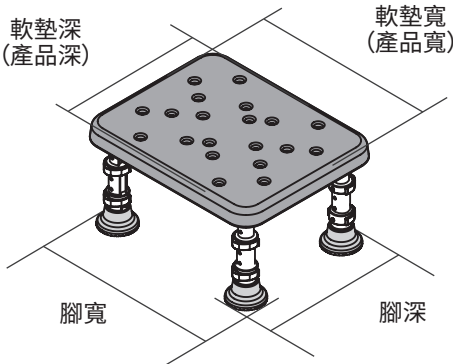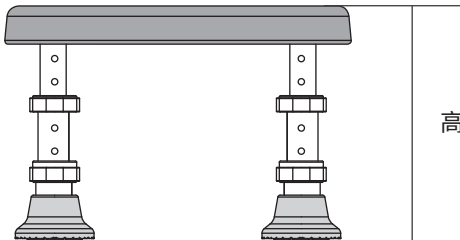寬／深						高					
											
		腳寬	腳深	軟墊寬	軟墊深	高					調整段數
小型	1220	28cm	22cm	30cm	24cm	12cm	14cm	16cm	18cm	20cm	5段
	1826					18cm	20cm	22cm	24cm	26cm	
標準	1220	36cm	28.5cm	37.5cm	30cm	12cm	14cm	16cm	18cm	20cm	5段
	1826					18cm	20cm	22cm	24cm	26cm	

使用前的確認

確認軟墊、高度調整腳











- 使用前請確認軟墊、腳框架與高度調整腳已確實安裝。

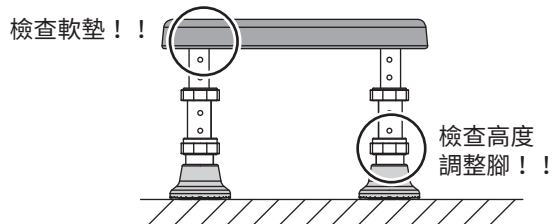

■ 椅面高度的調整方法 ■


1 椅面高度調整範圍

- 本產品可透過上下滑動兩種高度調整腳，並分別以高度調整銷固定，來調整椅面高度。
調整方法請參閱P6、P7的 **2 高調整腳**

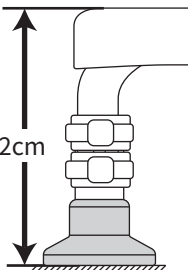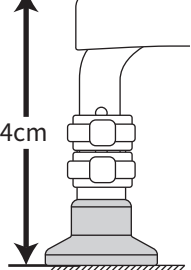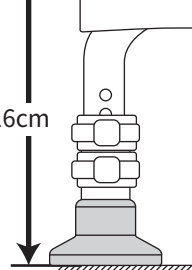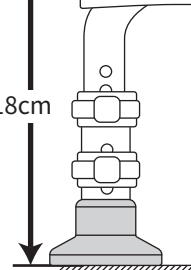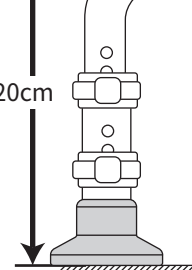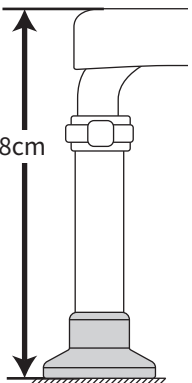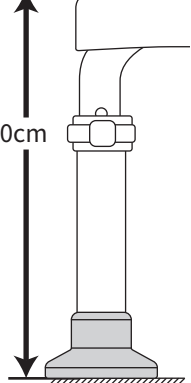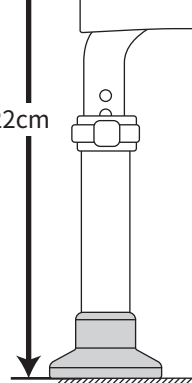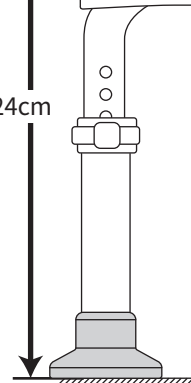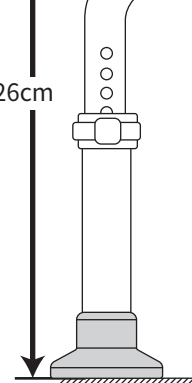產 品 名 稱	椅 面 高 度				
	12cm	14cm	16cm	18cm	20cm
小型1220 標準1220	出貨時 	高度調整腳 (小/上層) 一段 調整 	高度調整腳 (小/上層) 兩段 調整 	高度調整腳 (小/上層) 兩段 (大/下層) 一段 調整 	高度調整腳 (小/上層) 兩段 (大/下層) 兩段 調整 
	12cm	14cm	16cm	18cm	20cm
小型1826 標準1826	18cm	20cm	22cm	24cm	26cm
					
	18cm	20cm	22cm	24cm	26cm


2 高調整腳

- 將產品上下翻轉使椅面朝下，作業時會更容易進行調整。

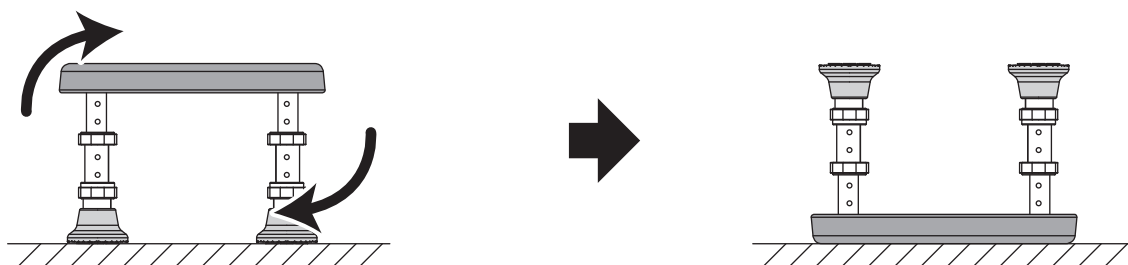


1 取下高度調整銷

取下高度調整銷，解除高度調整腳的固定。

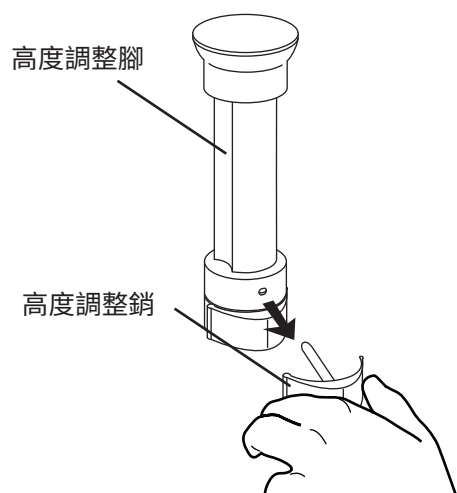


調整高度調整腳（小／上層）

調整圖中下側的調整腳時，請將兩支高度調整銷皆取下。

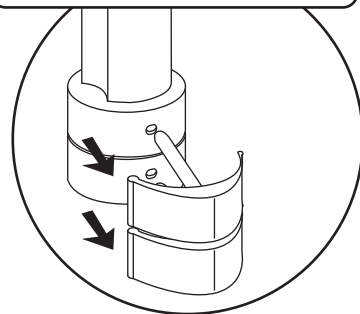


2 調整高度

將高度調整腳上下滑動調整高度，使固定桿與固定目標位置的管孔對齊。

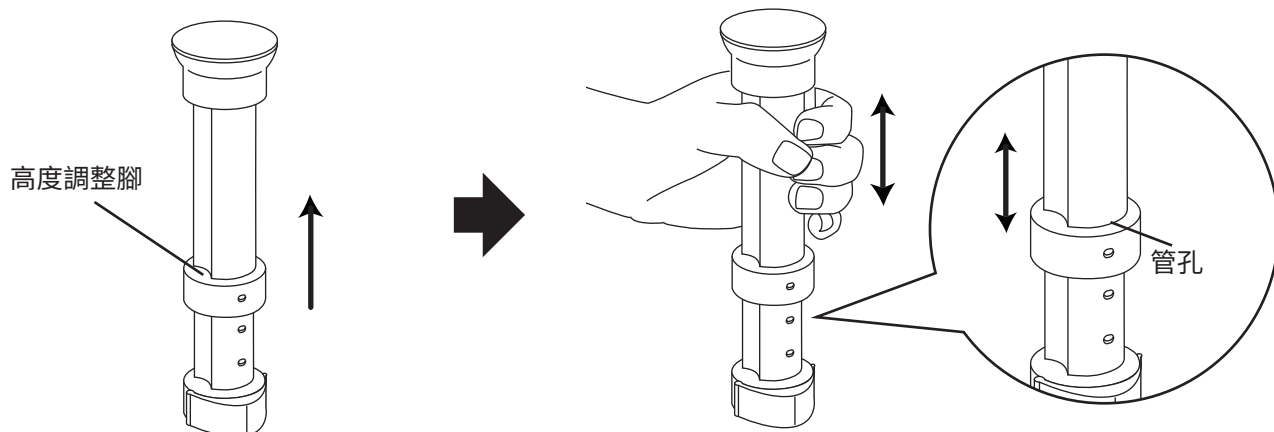


3 固定高度調整銷

將高度調整銷確實插入管孔中，固定高度調整腳。

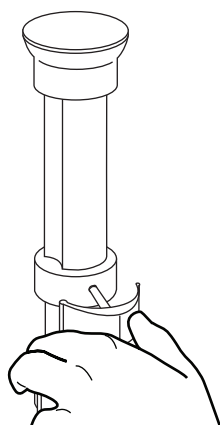

確認高度調整銷的固定

請確認高度調整銷的銷會如圖般從高度調整腳的安裝孔彈出。

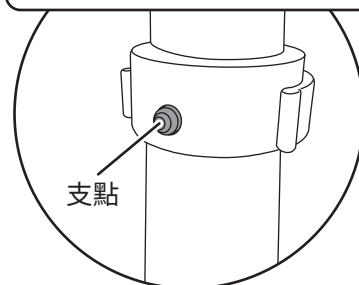

警告



務必遵守

■高度調整腳請務必固定於相同高度
若高度調整銷的固定位置不一致，
可能因不穩定而導致傾倒或破損。



務必遵守


■請確實將高度調整銷安裝在高度調整腳上，
安裝後請確認高度調整銷的銷會從安裝孔
彈出
使用中高度調整腳可能會脫落，導致傾倒而受傷。

■ 使用方法 ■


使用前請務必確認浴缸椅已穩定放置。

1 決定設置地點

①設置時請勿將腳橡膠壓在浴缸的排水口上。

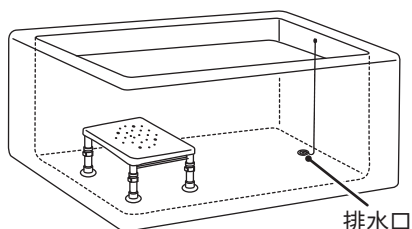

②使用前請從上方按壓浴缸椅，
讓迷你吸盤緊密貼附在浴缸底部。
※可能無法吸附在某些浴缸材質上。

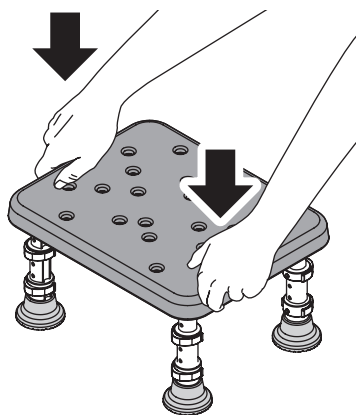

③請用手向下按壓一次，確認迷你吸盤已吸附在浴缸底部。



注意

■請勿在水湧出口、熱水出口、冷水出口或水龍頭附近使用。


否則可能導致變形、破損或燙傷。

■若設置於排水口附近，請注意浴缸水塞的鍊條。


可能導致主體晃動傾倒，並導致受傷。

2 進入浴缸

①為保持身體穩定，請緊握浴缸邊緣或浴缸扶手等，
同時單腳分別慢慢依序移至浴缸椅的中央部。

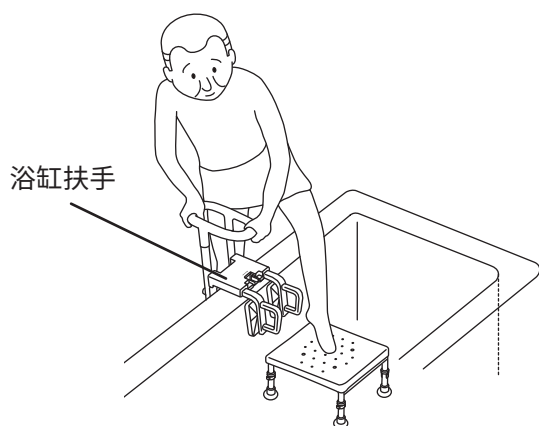

②請分別以單腳保持身體穩定，同時將腳依序移入浴缸內。

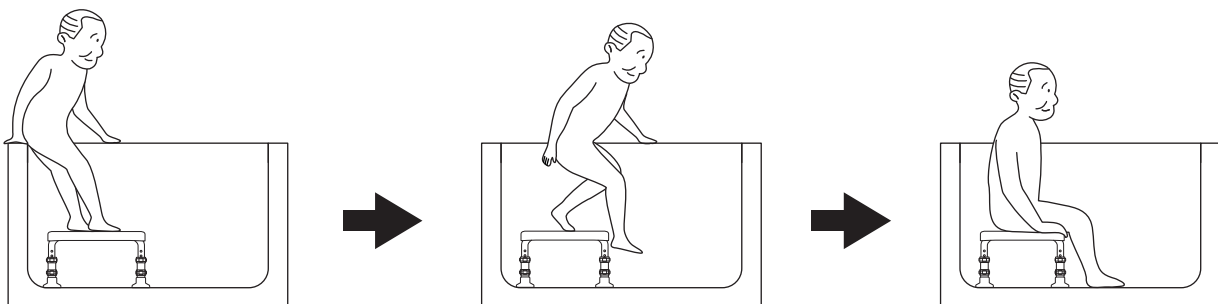


清潔保養

- 軟墊、高度調整腳可拆下清洗。
- 請使用稀釋的中性清潔劑，將海綿或柔軟的布沾溼來清洗產品，清洗後請以清水沖洗至無清潔劑殘留，再用乾布擦乾水分。
- 使用市售中性清潔劑時，請確認使用注意事項。
- 請存放於乾燥不潮溼的場所。
※即使已充分進行清潔保養，仍可能因使用環境而產生黴菌。


1 拆下軟墊

- 請先確實固定高度調整腳，再將軟墊向上拉起拆下。

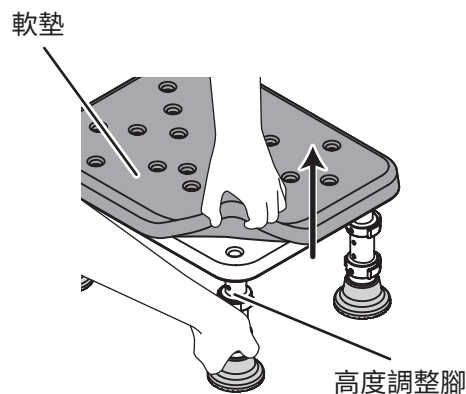


2 安裝軟墊

- 請將軟墊背面的凸起對準主體框架的孔，從上方確實按壓椅面進行安裝。

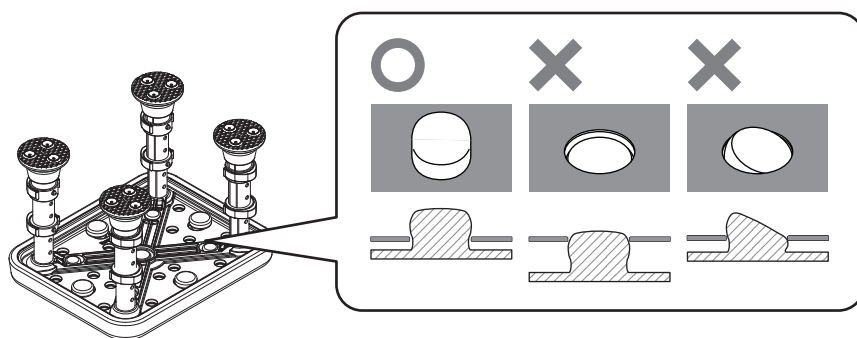

3 拆下高度調整腳

- 請取下高度調整銷，並拔出高度調整腳。
請參閱P6 ■ 椅面高度的調整方法 ■。

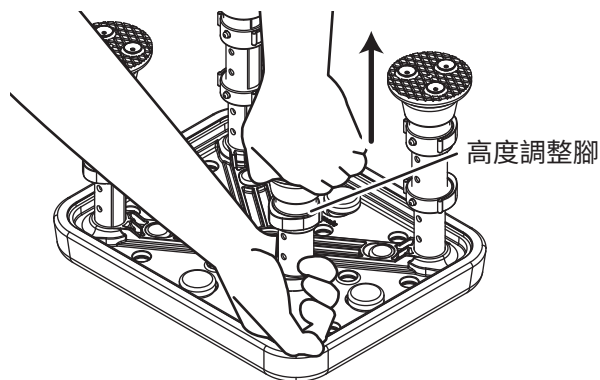

注意

■請勿澆淋熱水（60°C以上）。
否則可能導致主體破損而受傷。

■請勿將產品放置於戶外或陽光直曬的場所。
可能導致褪色、主體破損而受傷。

■請確認軟墊、高度調整腳與高度調整銷已確實安裝。
在未確實安裝的狀態下使用，可能會導致身體滑動或受傷。

■請勿使用棕刷、去汙粉、含研磨劑的海綿等或是氯系清潔劑、
酸性／鹼性清潔劑、稀釋劑、甲酚等。
可能因塑膠部位劣化或破損而導致受傷。



規格

產 品 名 稱		浴缸椅 [YUKURIA] 軟墊型 小型 1220	浴缸椅 [YUKURIA] 軟墊型 小型 1826	浴缸椅 [YUKURIA] 軟墊型 標準 1220	浴缸椅 [YUKURIA] 軟墊型 標準 1826
產 品 型 號		PN-L11520	PN-L11526	PN-L11620	PN-L11626
顏色		A:藍色 D:橘色 BR:摩卡棕色			
尺寸	產 品 尺 寸	寬30×深24cm		寬37.5×深30cm	
	高	12,14,16,18,20cm (5段調整)	18,20,22,24,26cm (5段調整)	12,14,16,18,20cm (5段調整)	18,20,22,24,26cm (5段調整)
	頂板面尺寸	寬30×深24cm		寬37.5×深30cm	
材質	頂 板 部	軟墊:EVA樹脂 主體:聚丙烯			
	高度調整腳	鋁			
	高度調整銷	聚丙烯、不鏽鋼			
	腳 橡 膠	乙丙橡膠			
產 品 重 量		2.3kg	2.4kg	3.2kg	3.3kg

關於防霉加工

本產品的頂板部（軟墊）與腳橡膠已施作防霉加工。
所謂防霉加工產品，是指與未經防霉加工的產品表面相比，確認能將特定黴菌的生長抑制在基準值以下的產品。
防霉性能的試驗遵循JIS標準，並根據抗菌產品技術協議會(SIAA)試驗方法的結果進行判定。

防霉加工相關資訊

- 防霉加工部位：頂板部（軟墊）
腳橡膠
- 防霉加工方法：混入



注意事項

- 防霉試驗依SIAA指定方法實施。
- 防霉加工並非用於消滅黴菌。
- 視使用條件而定，仍可能會產生黴菌。
- 符合SIAA安全標準。

廢棄時的注意事項

廢棄時請盡可能依材料類別進行拆解並依照當地的
垃圾分類規定廢棄。

安心檢查表

浴缸椅 [YUKURIA] 安全檢查表		※檢查欄位不足時，請影印使用。									
安全檢查項目		檢查結果（符合者請標示○）								處理步驟	
		日期									
安心檢查 	有晃動或鬆動等									若有標示○時，表示已處於危險狀態，請停止使用，並洽詢原購買產品的經銷商。	
	購買後已超過5年										
	框架有裂痕、變形或腐蝕										
	出現變色										
	吸盤無法吸附、或腳橡膠出現裂痕									已屆腳橡膠的更換時期。請更換腳橡膠。	

若出現上述檢查項目以外的異常時，請向經銷商等專業人員諮詢。

●關於產品的長期使用

1. 主體上的顯示內容

在主體上標示製造年月日，用於提醒可能會由於隨時間的劣化，導致提高發生危害的風險。

2. 所謂預估安全使用期間

對於一般家庭使用的浴缸椅 [YUKURIA]，在標準條件下以適當的方式使用，並進行適當的維護保養時，可安全無障礙使用的預估期間。並非免費保固期。

※若設置於一般家庭以外的場所（如醫院、各類設施等由不特定多數人使用之場所），視使用條件而定，可能會比預估安全期間更早發生劣化。

3. 所謂隨時間劣化

係指因長期使用或處理而發生的劣化。

【預估安全使用期間】5年（於一般家庭使用時）

若超過預估安全使用期間仍繼續使用，可能會由於隨著時間的劣化，導致受傷等事故。

販售者：台灣松下銷售股份有限公司

新北市中和區建六路57號

電話：0800-098800/02-412-8222

製造者：Panasonic AGE FREE Co., Ltd

總公司 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048號

© Panasonic AGE-FREE Co., Ltd. 2026