


使用說明書

淋浴座椅 [YUKURIA系列]

中椅面SP旋轉折疊式N

型號 PN-L41221

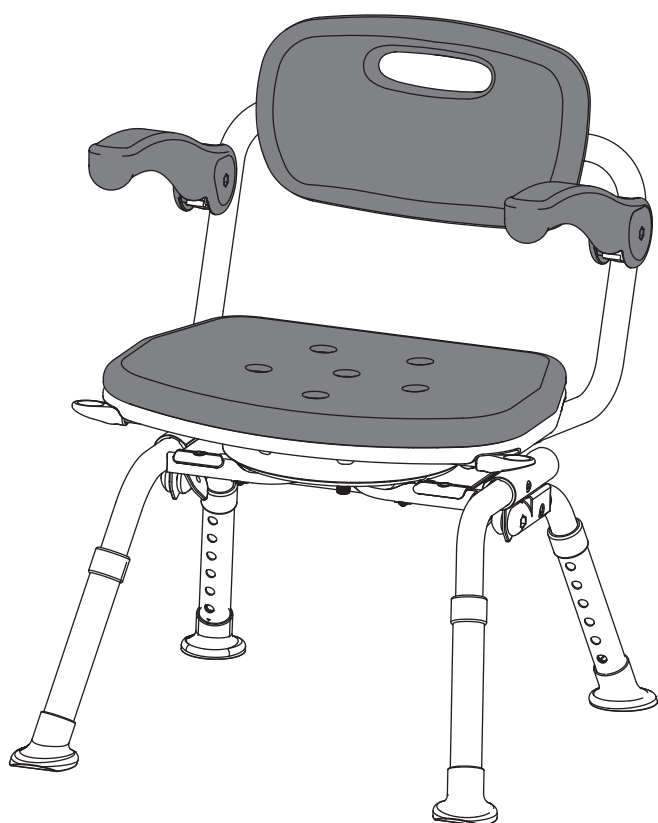

目錄

●安全注意事項		2
●各部分名稱		4
●商品尺寸圖		4
●使用方法		5
●清潔保養		7
●規格		8
●安心檢查表		9
●疑似故障時		9

最大使用者體重：100kg

使用前請務必閱讀。

誠摯感謝您購買淋浴座椅 [YUKURIA系列]。

- 請詳閱使用說明書，正確安全地使用本產品。
- 使用前請務必閱讀「安全注意事項」（第2、3頁）。
- 請確認已填寫保固書上的「購買日、銷售商名稱」等資訊，並與使用說明書一同妥善保存。

安全注意事項

請務必遵守。

請務必遵守下列說明事項，以免造成人身傷害或財物損失。

■對於因誤用而可能產生的危害或損害程度，已加以分類並進行說明。



警告

表示為「有可能導致死亡或重傷等的內容」。



注意

表示為「有可能導致受傷或造成財物損害的內容」。

■務必遵守內容的種類以下面的圖示分別說明。

(下記為圖形表示範例)



本圖示表示禁止之意。



本圖示表示務必遵照指示執行之意。



警告



禁止

■請勿將上半身大幅傾斜並過度將體重靠在扶手上。否則可能導致傾倒而受傷。



禁止

■請勿刻意搖晃。否則可能導致傾倒可能導致受傷。



禁止

■於人坐在椅子上的狀態下，請勿移動或拖拉主體。否則可能導致傾倒（破損）而受傷。



禁止

■請勿同時坐兩人以上。否則可能導致傾倒可能導致受傷。



禁止

■請勿站在椅面上、將腳放在椅面上或跳上椅面。否則可能導致傾倒而受傷。



禁止

■體重超過100kg者請勿使用。否則可能導致本體破損而受傷。



禁止

■請勿套上商品包裝用的塑膠袋或薄膜。可能導致窒息。



禁止

■請勿將上半身大幅向後仰並過度將體重靠在靠背上。否則可能導致傾倒（破損）而受傷。



禁止

■請勿在浴室沖洗區以外的場所使用。否則可能導致傾倒而受傷。



禁止

■請勿坐在椅面中央以外的位置。若坐在椅面邊緣、靠背上等並非坐在椅面中央的位置，可能導致產品破損，或導致傾倒而受傷。



禁止

■請勿用於浴室內使用的椅子以外用途。若將本產品當作兒童的玩具或腳踏板等使用，可能導致破損或受傷。



禁止

■折疊椅子時請注意避免夾到手指。可能導致受傷。



禁止

■請勿朝橫向用力施力。否則可能導致傾倒而受傷。



禁止

■請勿將手指或腳趾伸入椅面的排水孔。否則手指或腳趾會無法拔出，因而導致受傷。



務必遵守

■將4支腳調整為相同高度。否則可能造成主體不穩定，導致傾倒而受傷。



務必遵守

■請放置於浴室地面平坦穩定的位置使用。放置於不穩定的場所否則可能導致傾倒而受傷。



禁止拆解

■切勿自行拆解、維修或改造。請勿使用非原廠替代零件。否則可能導致主體無法正常運作，並導致破損或受傷。修理請洽詢原購買產品的經銷商。

警告



- 調整高度時，請確實固定調整腳管的調整銷。否則可能造成主體不穩定，導致傾倒而受傷。



- 使用前請確認椅子已完全展開且椅面呈水平。若在非水平狀態下使用，椅子會變得不穩定，可能導致傾倒而受傷。



- 請勿將靠背當作支撐身體的扶手使用。否則可能造成主體傾倒，並導致受傷。此外也可能導致軟墊脫落，並導致傾倒而受傷。



- 搬運時請勿只抓住軟墊提起。否則可能導致軟墊脫落而受傷。


注意



- 請勿在扶手抬起的狀態下拉動或提起扶手。否則可能導致主體破損而受傷。



- 請勿浸入水中使用或清洗。否則會造成腐蝕，可能導致管件破損而受傷。否則可能因不穩定而導致受傷。

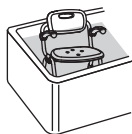

- 請勿使用棕刷、去汙粉、含研磨劑的海綿等或是氯系清潔劑、酸性／鹼性清潔劑、稀釋劑、甲酚等。否則可能因塑膠部位劣化或破損而導致受傷。



- 請勿將產品放置於戶外或陽光直射的場所。否則將導致褪色或龜裂。



- 請勿澆淋熱水（60°C以上）。否則可能導致軟墊壓縮變形而無法安裝。



- 請勿靠近火源。可能引發火災或導致變形。



- 請勿將扶手或靠背當作支撐身體的扶手使用。否則可能導致主體傾倒而受傷。



- 請勿於三溫暖使用。將造成主體破損，並導致受傷。



- 請勿使用含氯藥劑進行殺菌或消毒，或使用溫泉水或含硫磺成分的入浴劑。否則會造成腐蝕，可能導致管件破損而受傷。



- 請定期檢查各部位有無異常，例如螺絲是否鬆動等。否則可能導致主體無法正常運作，導致破損或受傷。



- 使用稀釋的中性清潔劑，將海綿或柔軟的布沾溼來清洗產品，清洗後以清水沖洗至無清潔劑殘留，再用乾布擦乾水分。若附著清潔劑，會容易打滑，可能導致傾倒而受傷。



- 使用前與使用後，請將地板及淋浴椅上附著的肥皂或洗髮精沖洗乾淨。若附著肥皂或洗髮精，會容易打滑，可能導致傾倒而受傷。



- 請確認腳橡膠已確實安裝。腳橡膠若脫落，會容易打滑，可能導致傾倒而受傷，此外也會使浴室地面刮傷。




- 請注意避免過度用力按壓調整銷，以免按鈕無法恢復。否則可能造成調整腳管無法固定，導致傾倒或受傷。




- 上下調整扶手時，請注意避免夾到手或手指。可能導致受傷。

■ 各部分名稱 ■

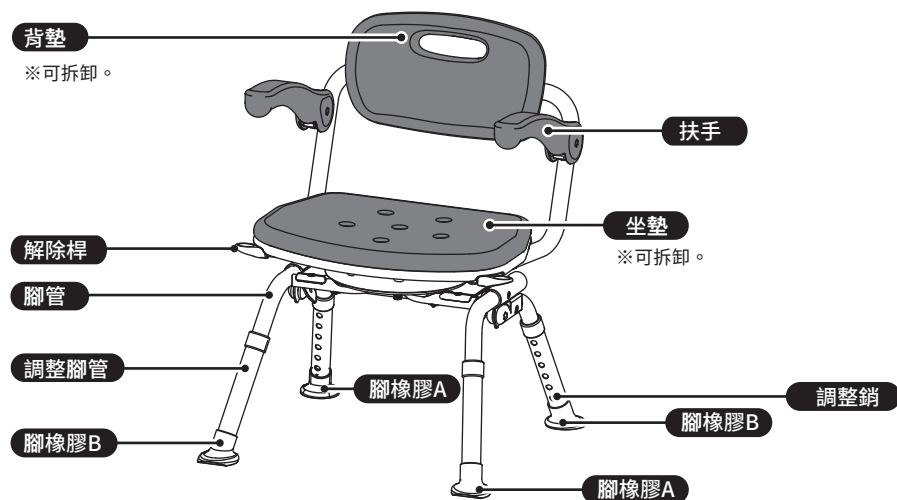

■ 商品尺寸圖 ■

單位：mm

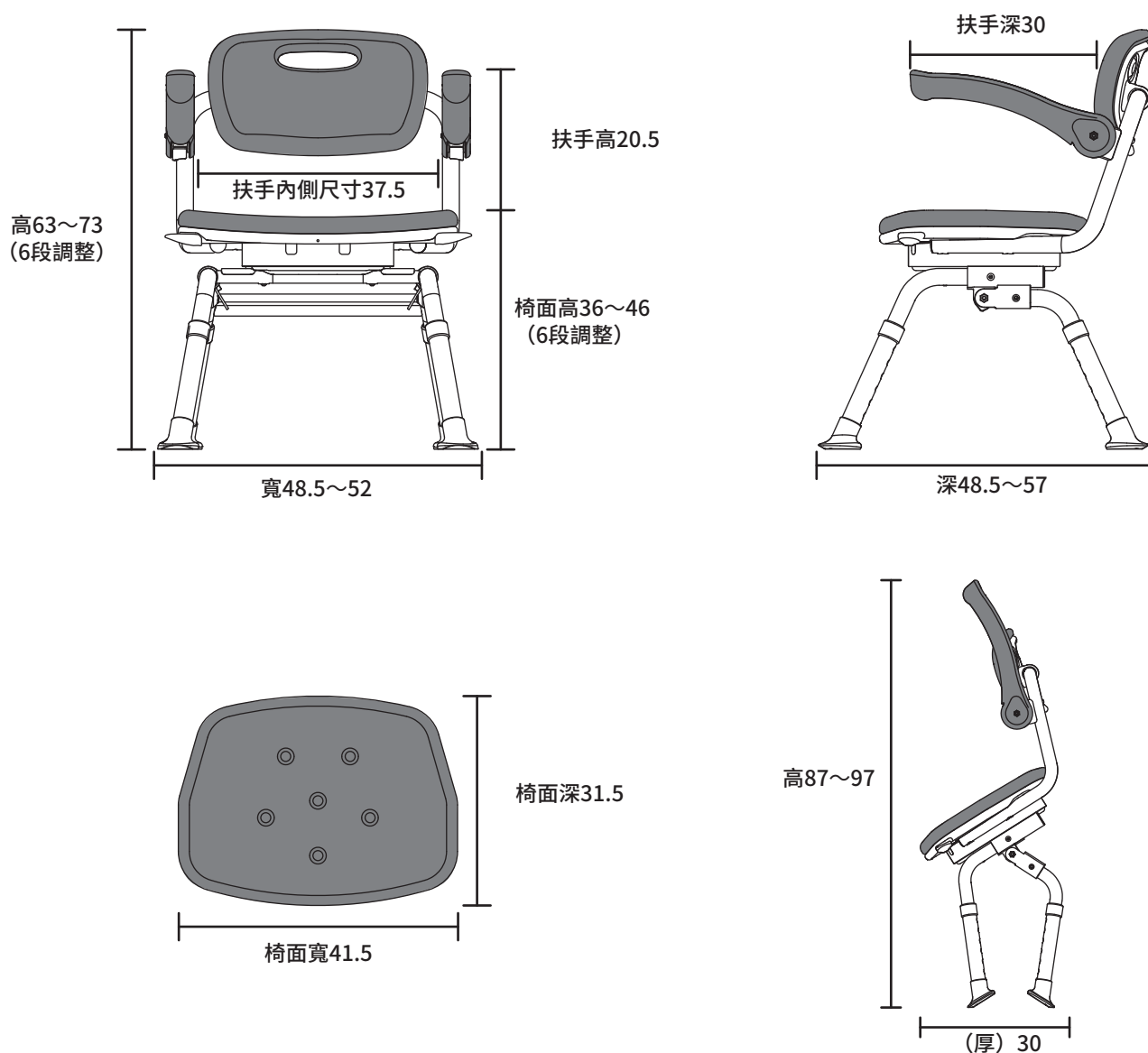


■ 使用方法 ■

- 此淋浴椅請於浴室沖洗區，在淋浴或清洗身體時使用。
- 請依身體狀況等將椅面調整至合適的高度。
椅面高度為36~46cm，可分6段進行調整。（間隔2m）

1 調整椅面高度

- ① 請按壓調整銷，解除鎖定。

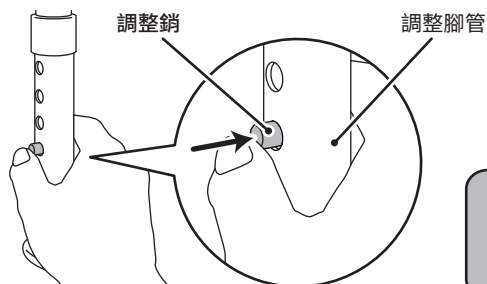


若使用筆等尖細工具用力按壓，
調整銷可能會卡進管內而無法恢復。




- 請注意避免過度用力按壓調整銷，以免按鈕無法恢復。
否則可能造成調整腳管無法固定，導致傾倒或受傷。

- ② 請上下滑動調整腳管，將調整銷對準合適的使用高度的管孔。
高度對準後，調整銷會向外彈出並固定高度。

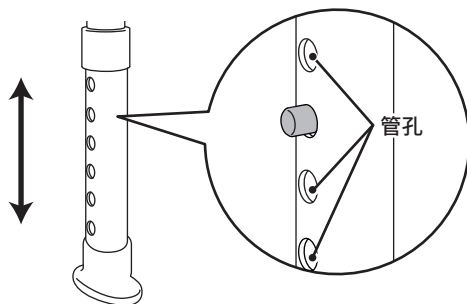

- ③ 請確認調整腳管已確實固定。

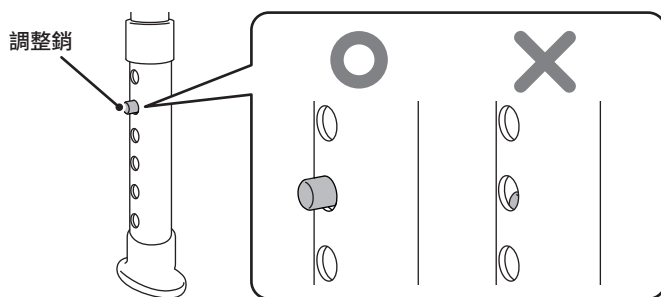

調整銷可能會被遮住而看不見。
此時請拉出調整腳管並取下，
調整銷的位置後重新安裝。



- 將4支腳調整為相同高度情況。
否則可能造成主體不穩定，導致傾倒而受傷。




- 請確認調整腳管已確實安裝腳橡膠。
腳橡膠若脫落，會容易打滑，可能導致傾倒而受傷。
此外也會使浴室地面刮傷。
- 使用前請確認各部位是否有鬆動、晃動或變形等情況。
否則可能導致傾倒而受傷。

說明

- 請勿長時間放置於PVC地墊上。
可能導致地墊或腳橡膠劣化及變色。

2 展開椅子

①請握住靠背的把手，將主體向後傾斜，並以後腳為支點，將靠背往「斜下方」壓出。

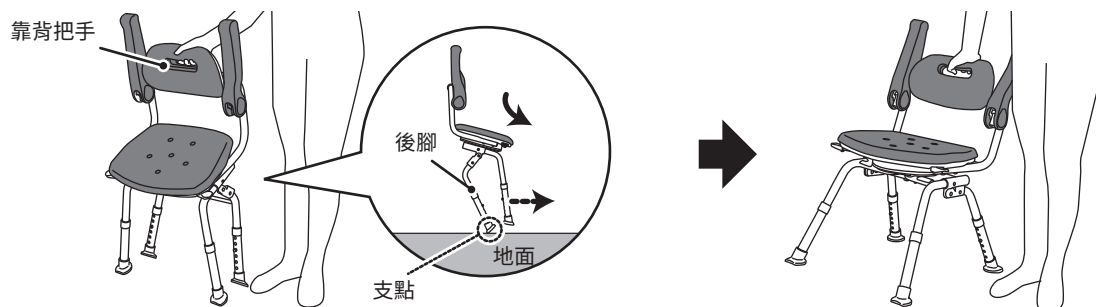

②請按壓至椅面呈水平。



■使用前請確認椅子已完全展開且椅面呈水平。


若在非水平狀態下使用，椅子會變得不穩定，可能導致傾倒而受傷。

■請放置於浴室地面平坦穩定的位置使用。

若放置於不穩定的場所，可能導致傾倒而受傷。

3 折疊椅子


①請將椅面旋轉，使靠背的背面朝向連接管（後腳）側。

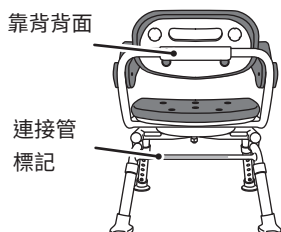

②請將扶手向上掀起。



③請握住靠背的把手，將主體向後傾斜，並以後腳為支點，將靠背往斜上方拉起。

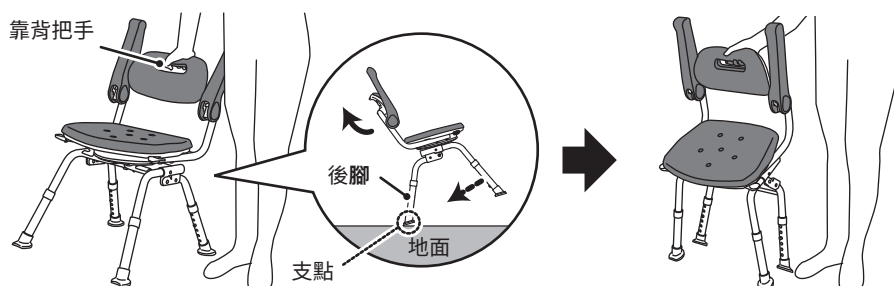


請將靠背抬起直到後腳停止的位置。
腳內部內建折疊鎖定裝置，
若未完全折疊，
腳部可能會展開。

折疊椅子時的注意事項

●當浴室地面等容易打滑時

若浴室地面處於容易打滑的狀態，可能無法依上圖方法折疊。
此時請如右圖所示，用手按壓後腳並進行折疊操作。

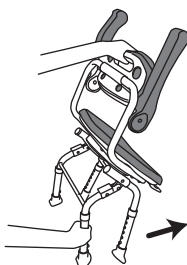

●椅子自行立起。

在凹凸不平或傾斜的地面上可能無法自行立起，
請放置於平坦穩定的場所。





4 旋轉椅面

- 按下椅面側邊前方的解除桿，將解除鎖定，椅面可旋轉。
- 椅面可左右旋轉360°。
- 每旋轉45°鎖定一次。

① 請按下其中一側或兩側的解除桿，並旋轉椅面。
在旋轉過程中，鎖定會處於解除狀態。

② 每45°鎖定一次。

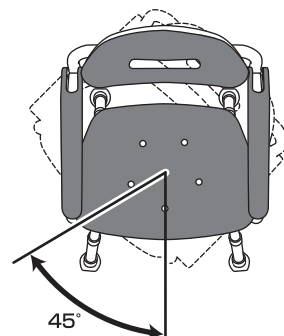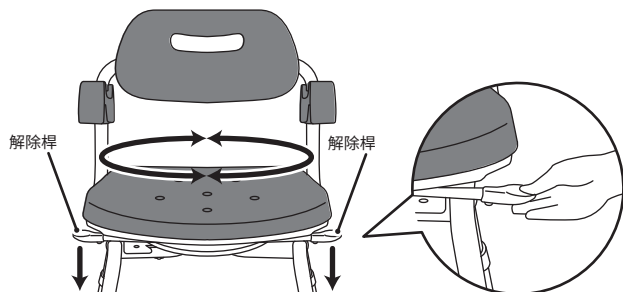

警告

■ 請確認椅面已確實鎖定。
否則可能導致傾倒而受傷。





注意

■ 請勿對解除桿過分施力，或以其支撐身體。
將造成解除桿破損，並導致傾倒或受傷。

清潔保養

- 背墊與坐墊可拆下清洗。
- 請用中性清潔劑清洗，並以清水（20°C以下）將清潔劑沖洗乾淨後，用乾布擦乾水分。
- 要恢復原狀時，請將軟墊的凸起面分別放入椅面與靠背的孔中壓入。
- ※ 即使已充分進行清潔保養，仍可能因使用環境而產生黴菌。
- 請存放於乾燥不潮溼的場所。

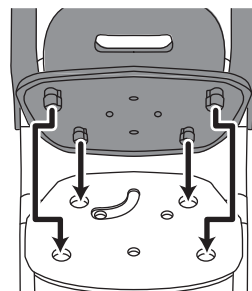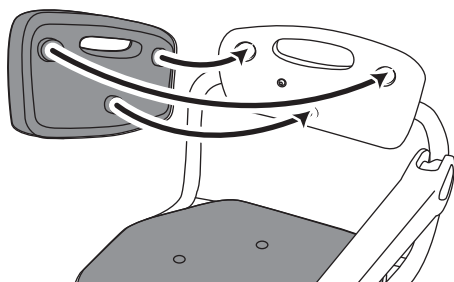

注意

- 請勿澆淋熱水（60°C以上）。
否則可能導致軟墊壓縮變形而無法安裝。
- 請勿設置於浴室乾燥機の出風口附近。
否則可能導致軟墊壓縮變形而無法安裝。
- 請勿將產品放置於戶外或陽光直曬的場所。
可能導致褪色、主體破損而受傷。
- 請確認背墊與坐墊已確實安裝。
在未確實安裝的狀態下使用，可能會導致身體滑動或受傷。
- 請勿使用棕刷、去汙粉、含研磨劑的海綿等或是氯系清潔劑、酸性／鹼性清潔劑、稀釋劑、甲酚等。
可能因塑膠部位劣化或破損而導致受傷。



■規格■

產品名稱	淋浴椅 [YUKURIA] 中椅面SP旋轉折疊式N		
產品型號	PN-L41221 A / D / BR		
顏色	A：藍色 D：橘色 BR：摩卡棕色		
產品重量	6.4kg		
尺寸(cm)		使用時	折疊時
	寬	48.5~52	48.5~52
	深	48.5~57	(厚) 30
	高	63~73	87~97
	椅面高	36~46 (6段調整)	
材質	靠背／椅面：聚乙烯、背墊／坐墊：EVA樹脂 扶手：EVA樹脂、腳管：鋁、腳橡膠：EVA樹脂、高度調整腳彈簧／銷：不鏽鋼		
最大使用者體重	100kg以下		

關於防霉加工

本產品的軟墊與腳橡膠已施作防霉加工。

所謂防霉加工產品，是指與未經防霉加工的產品表面相比，確認能將特定黴菌的生長抑制在基準值以下的產品。

防霉性能的試驗遵循JIS標準，並根據抗菌產品技術協議會(SIAA)試驗方法的結果進行判定。

■防霉加工相關資訊

- 防霉加工部位：軟墊（靠背、椅面、扶手）
腳橡膠
- 防霉加工方法：混入



⚠ 注意事項

- 防霉試驗依SIAA指定方法實施。
- 防霉加工並非用於消滅黴菌。
- 視使用條件而定，仍可能會產生黴菌。
- 符合SIAA安全性標準。

廢棄時的注意事項

廢棄時請盡可能依材料類別進行拆解並依照當地的垃圾分類規定廢棄。

安心檢查表

淋浴椅 [YUKURIA] 安全檢查表		※檢查欄位不足時，請影印使用					
安全檢查項目		檢查結果（符合者請標示○）					處理步驟
※請每月檢查1次		日期					
	框架有裂痕、變形或腐蝕。						若有標示○時，表示已處於危險狀態，請停止使用，並建議進行更換，以防止故障或事故發生。
	購買後已超過5年。						
	椅面、扶手、靠背有晃動或鬆動等情況。						若有標示○時，請洽詢原購買產品的經銷商。
	出現變色。						
	腳橡膠已破損。						

若出現上述檢查項目以外的異常時，請向經銷商等專業人員諮詢。

●關於產品的長期使用

1. 主體上的顯示內容

在主體上標示的批號，用於提醒可能會由於隨時間的劣化，導致提高發生危害的風險。

2. 所謂預估安全使用期間

對於一般家庭使用的淋浴椅，在標準的使用條件下，以適當的方式使用，並進行適當的維護保養時，可安全無障礙使用的預估期間。並非免費保固期。

此外，不對於偶發事故進行補償。

※若設置於一般家庭以外的場所（如醫院、設施等不特定多數人使用的場所），視使用條件而定，可能會比預估安全使用期間更早發生劣化。

3. 所謂隨時間劣化

係指因長期使用或處理而發生的劣化。

【預估安全使用期間】5年（一般家庭使用時）

若超過預估安全使用期間仍繼續使用，可能會由於隨時間的劣化導致受傷等事故。

疑似故障時

在委託維修前，請先閱讀以下內容。

狀況	確認	處理
使用過程中 主體晃動	●腳橡膠是否有離開地面？	●請確認腳橡膠已接觸地面。(參閱P6)
	●高度調整管是否已固定？	●請確認調整腳管已確實固定。(參閱P5)

販售者：台灣松下銷售股份有限公司

新北市中和區建六路57號

電話：0800-098800/02-412-8222

製造者：Panasonic AGE FREE Co., Ltd

總公司 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048號

© Panasonic AGE-FREE Co., Ltd. 2026